



Animation erstellen

Ab Versionen > 3.2.46 kann in den Modulen [V.T.O.3D](#) und [Aligner 3D](#) zu dem mit Taste [Als Befund] angelegten Planungsbefund optional eine Animation der dort durchgeführten Planung gespeichert werden. Das Speichern der Animation erfolgt zusammen mit dem Speichern des Befundes, wenn die Option [Animation erstellen] zuvor per Rechtsklick auf dieselbe Taste aktiviert wurde.

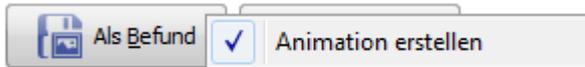

Die Animation kann im Vollbild des Planungsbefundes angezeigt werden, wenn im Vollbild-Kontextmenü der Eintrag [Animation] ausgewählt wird. Daraufhin wird ein Slider mit Play-Taste [▶] angezeigt.

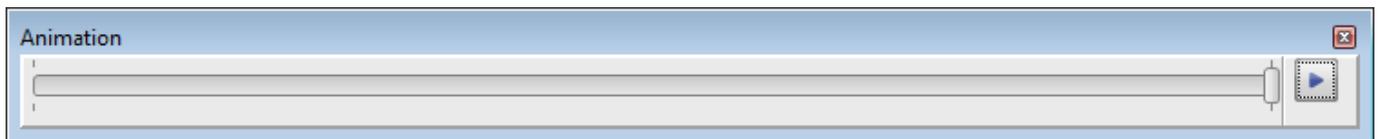

Im Menü der Playtaste können zusätzlich Optionen für die Wiedergabe der Animation eingestellt werden:

- Schleife
- Schnell
- Normal
- Langsam

Gespeicherte Animationen lassen sich auf dieselbe Art auch im Vollbild von [OnyxReports](#) verwenden, wenn beim Erstellen des Reports die Checkbox [Vorschau] aktiviert war.

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=3625>

Last update: **2023/06/26 07:48**

