
#4315 3D-Export über Thmbnail-Kontextmenü

Ab Release 3.2.78 kann der 3D-Exportdialog auch über das Thumbnail-Kontextmenü eines 3D-Befundes auf Reiter |Bilder/3D-Daten| mit Eintrag [Speichern] aufgerufen werden. Daraufhin öffnet sich derselbe Dialog, der sich auch im Kontextmenü jeder 3D-Objektliste oder über das Modul-Icon [Daten exportieren|Objekte speichern] aufrufen lasst.

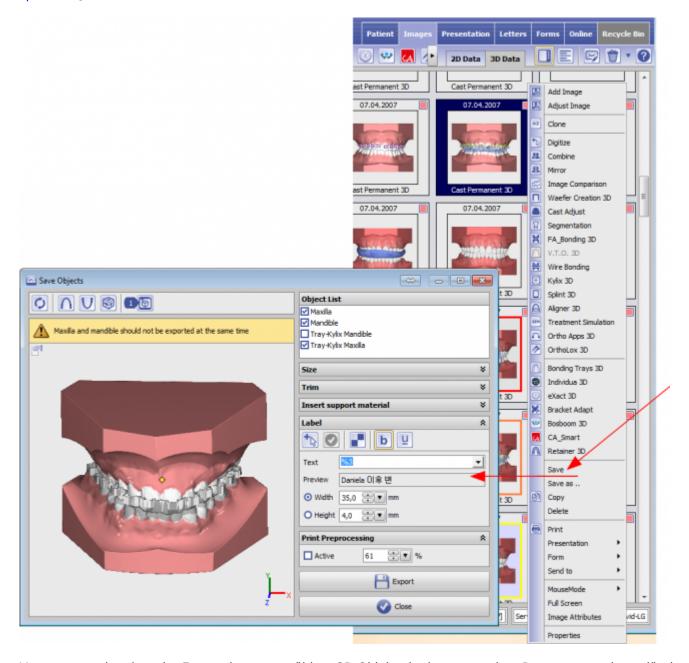

Voraussetzug ist, dass der Export der ausgewählten 3D-Objekte in der verwendete Programmversion zulässig ist.

From:
https://onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://onyxwiki.net/doku.php?id=4315

Last update: 2017/06/15 15:15



https://onyxwiki.net/ Printed on 2023/10/22 20:57