


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Carestream

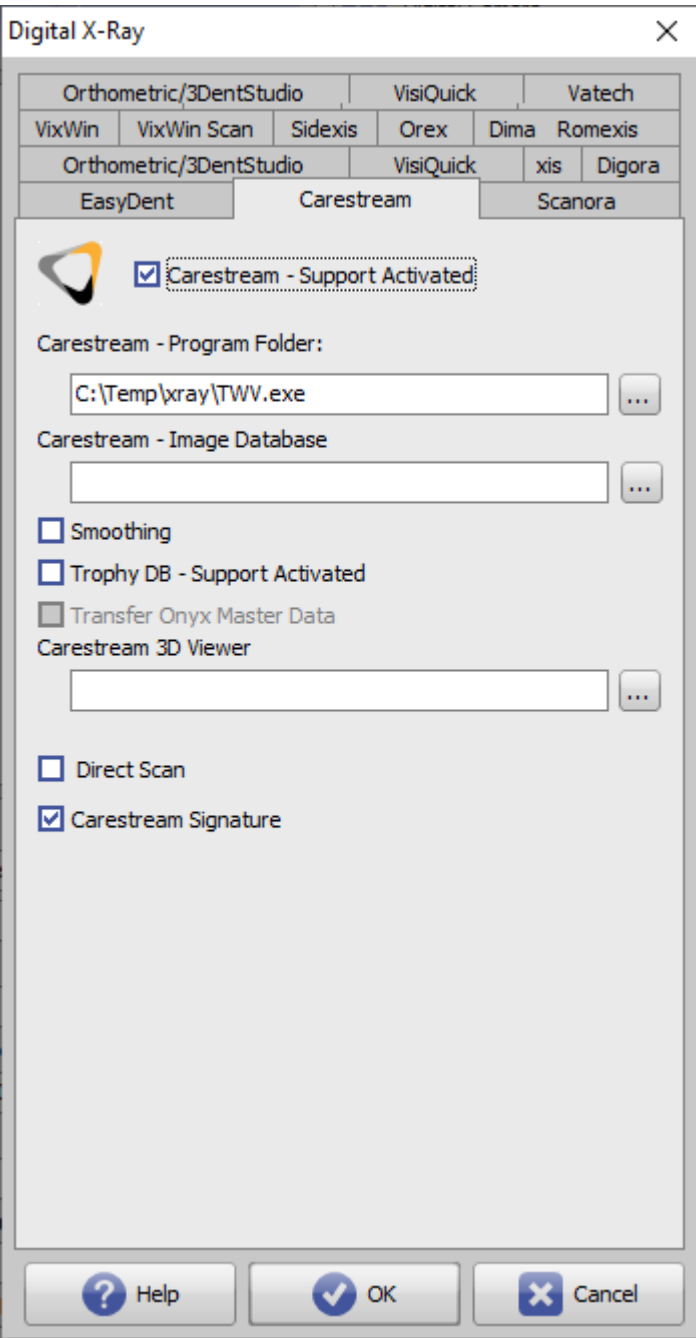

Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\TWV.exe
Bildübergabepfad [...]	Pfad der Carestream-Bilddatenbank
[Glättung]	Verbesserung der Anzeige hochau aufgelöster Bilder durch Resampling
[Trophy DB]	vorhanden DB der Software nutzen
[Onyx - Stammdaten übergeben]	Stammdaten bei Aufruf übergeben
Carestream 3D Bildbetrachter [...]	Pfad zum internen 3D Betrachter
[Carestream Signature]	interne Benennung der Bildablage verwenden

Verweise

 [Carestream Landmarks übernehmen](#)

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=carestream>

Last update: **2022/07/07 13:20**

