


Modul Kombinieren 2D

Mit Modul Kombinieren 2D können zwei Bilder mit unterschiedlichen, aber überlappenden Inhalten miteinander kombiniert werden. Dabei wird das zweite Bild hinter dem ersten Bild komplett oder in einer vorgegebenen Region anhand gemeinsamer Referenzpunkte mit wählbarer Transparenz eingeblendet. Zusätzlich kann die Durchzeichnung eines der beiden Bilder überlagert werden.

Erste Schritte

1. Modul mit 2 Bildern öffnen
2. Korrespondierende Punkte wählen/setzen
3. Überlagerungsregion definieren
4. Auf Reiter |Kombinieren| wechseln
5. Überlagerung optional modifizieren
6. Überlagerung als Projekt und/oder Befund speichern

Moduloberfläche

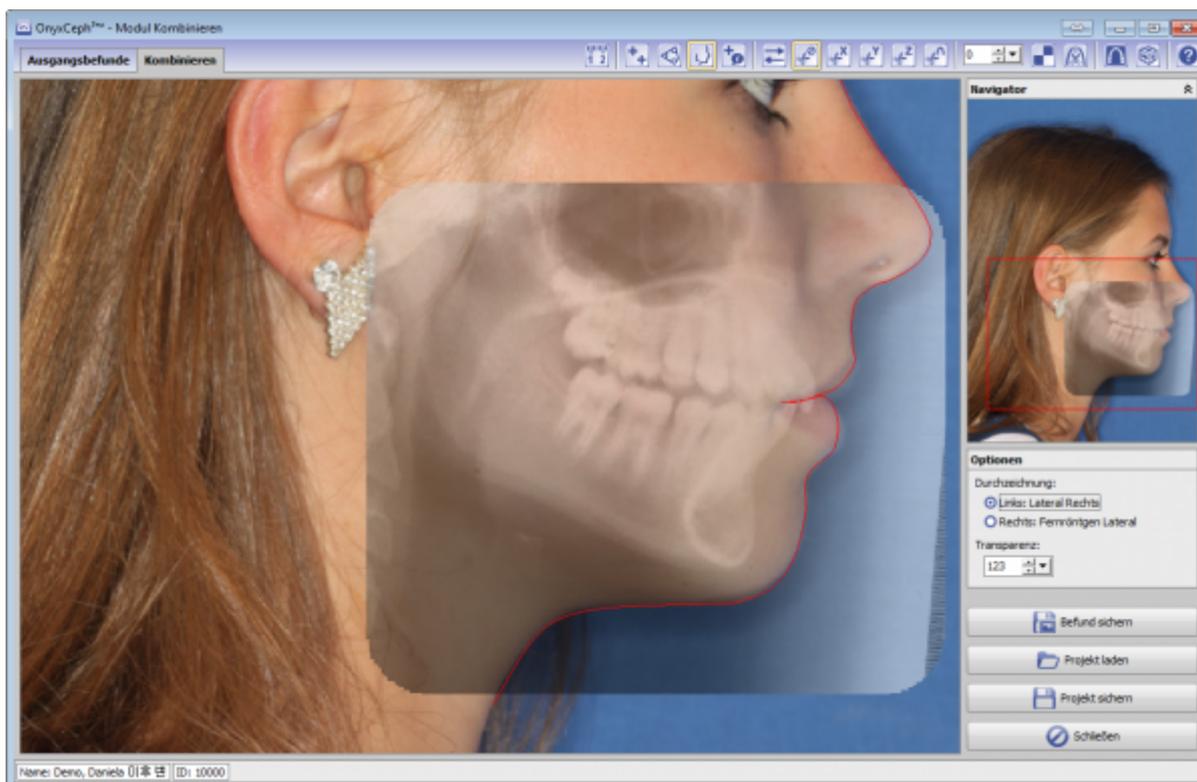

\\

Verweise



From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine_2d&rev=1584732791

Last update: **2020/03/20 20:33**

