2024/05/18 01:14 1/2 Modul Befundvergleich 3D


Modul Befundvergleich 3D

Modul Befundvergleich 3D wird mit mehrfach ausgewählten Thumbnails der im Hinblick auf Mess- und Analyseergebnisse zu vergleichenden 3D-Datensätzen aufgerufen. Im Modul lassen sich Durchzeichnungstyp und Analyse zuweisen, die für den numerischen Ergebnisvergleich verwendet werden sollen. Befundvergleiche können als Projekte gespeichert und im Modul oder aus dem Dokumentenbaum auf Reiter |Patient| heraus wieder geöffnet werden.

Erste Schritte

- 1. Befund-Thumbnails markieren
- 2. Modul öffnen
- 3. Bildtyp wählen
- 4. Analyse wählen
- 5. Vergleichsprojekt speichern

Moduloberfläche

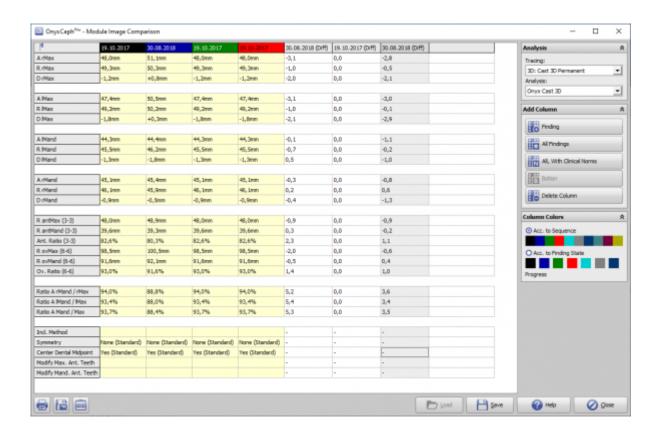

Verweise

Last update: 2019/08/21 11:34

From:

http://www.onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=image_comparison_3d&rev=1566380045

Last update: 2019/08/21 11:34



http://www.onyxwiki.net/ Printed on 2024/05/18 01:14