


Kylix 3D

Modul Kylix 3D erlaubt die Konstruktion von Bracketadaptern unterschiedlichen Designs auf den zugehörigen virtuellen Kronen, um die z.B. in Modul [FA_Bonding](#) oder [Wire_Bonding](#) virtuell geplante Bracketpositionen mit Hilfe von konventionellen Tiefziehschienen, die über dem gefertigten Modell gefertigt werden, zu übertragen.

Erste Schritte

1. Form und Dicke für Kylix (Fassung) festlegen und erzeugen
2. Form und Dicke für Basis (Auflage) festlegen und erzeugen
3. Als neuen Befund speichern oder direkt über Objektliste 3D exportieren

Moduloberfläche

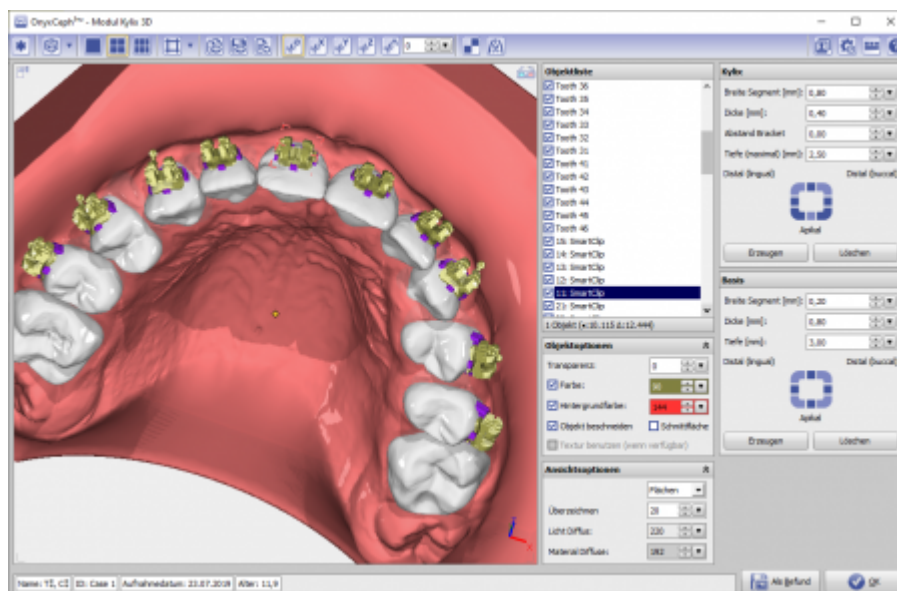

Controls

- [Iconmenü](#)
- [Panel Links](#) | [Panels Mitte](#) | [Panels Rechts](#)
- [Statuszeile](#) | [Modul-Tasten](#)

Iconmenü



Panel Links

[3D-Viewpanel](#)

Panels Mitte

[Panel Objektliste](#)[Panel Objektoptionen](#)[Panel Ansichtsoptionen](#)

Panels Rechts

[Panel Beschneiden](#)[Panel Typdefinition](#)[Panel Kylix](#)[Panel Basis](#)[Panel Beschriftung](#)

Statuszeile

- Name: (Patientenname, Vorname)
- ID: (Patientennummer)
- Aufnahme datum: (Befunddatum)
- Alter: (Patientenalter zum Befunddatum)

Name: Demo, Daniela 이 후 변	ID: 10000	Aufnahme datum: 25.04.2010	Alter: 19,6
---------------------------	-----------	----------------------------	-------------

Modul-Tasten



Verweise

Screenshots	
3D Views	
Videos	youtube Google
Links	

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=kylix_3d&rev=1513699344

Last update: **2017/12/19 17:02**

