

Modul Ortho Apps 3D




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	☑	☑	☑

Das Modul Ortho Apps dient der Konstruktion virtueller Apparaturen aus automatisch platzierbaren Bändern, 3D Objekten einer vom Benutzer erweiterbaren Bibliothek und 3D Verbindungselementen zwischen diesen.

Erste Schritte

1. Bauteile auswählen und einfügen
2. Bauteileigenschaften wie Zementspalt am Band oder 3D-Positionen anpassen
3. Apparatur berechnen und einzelne Komponenten exportieren
4. Als Projekt und neuen Befund speichern

Moduloberfläche

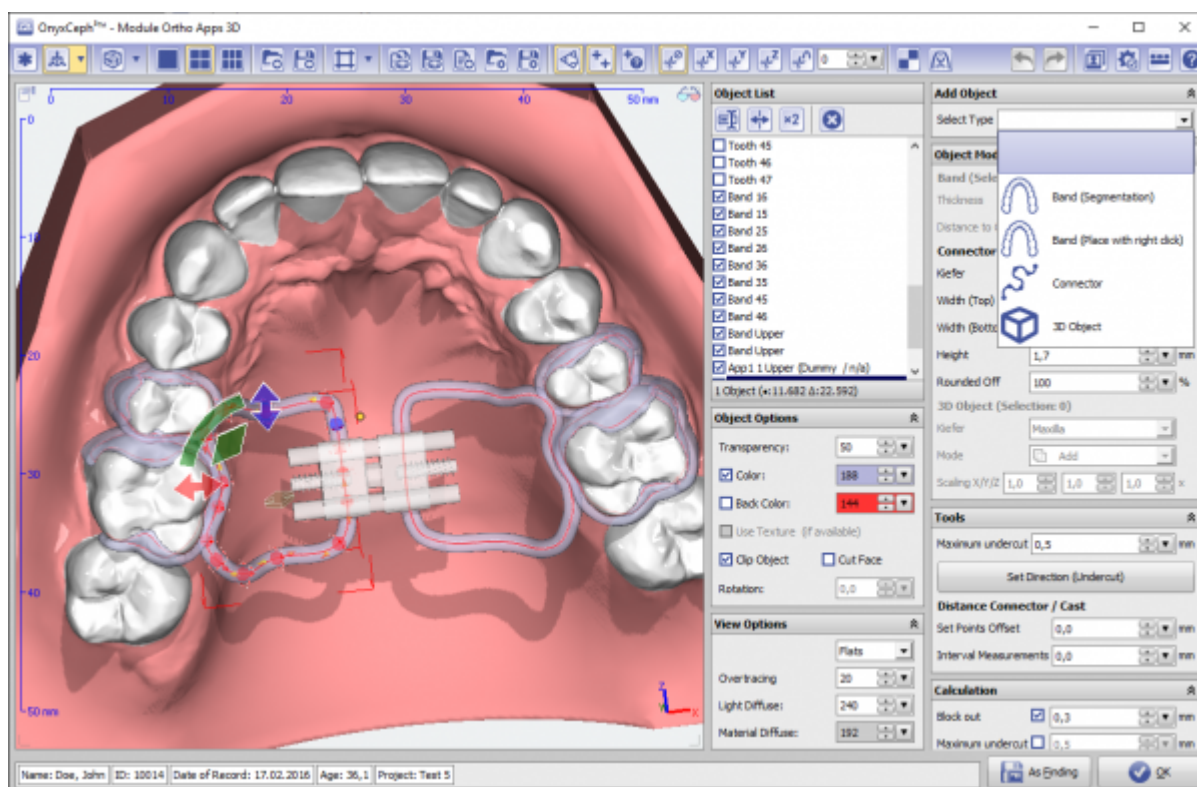

Verweise

	Modul-Handout Ortho Apps
	KFO-Apparaturen virtuell designen (Artikel COO 2019)
	KFO-Apparaturen virtuell designen (Artikel KN 2020)
	Flyer
	Design-Beispiele

Aufbereitete 3D Komponenten

Die Downloads der folgenden Liste sind Patch-Dateien (O3P), die Sie mit OnyxCeph direkt öffnen (oder über den Menüpunkt "Optionen"→"Patch installieren" hereinladen) können. Sie enthalten aufbereitete Bauteile verschiedener Hersteller für die Verwendung im Modul Ortho Apps, die der Benutzer über die 3D-Bibliothek der Objekte (Menüpunkt "Ansicht"→"3D Objektbibliothek") auch selbst ergänzen kann.

Hersteller	Beschreibung	Download
Dentaurum	GNE-Schraube hyrax® click Maxi - 12, ohne Arme, REF 602-834-12	Link
Dentaurum	GNE-Schraube hyrax® click Medium - 10, ohne Arme, REF 602-832-12	Link
Dentaurum	GNE-Schraube hyrax® click Mini - 7, ohne Arme, REF 602-830-12	Link
Dentaurum	GNE-Schraube hyrax® Maxi - 12, ohne Arme, REF 602-811-12	Link
Dentaurum	GNE-Schraube hyrax® Medium - 10, ohne Arme, REF 602-808-12	Link
Dentaurum	GNE-Schraube hyrax® Mini - 7, ohne Arme, REF 602-800-12	Link
Tiger Dental	PowerScrew 08 Art.-Nr. 11011 (0.8 mm offen)	Link
Tiger Dental	PowerScrew 10 Art.-Nr. 18222 (0.8 mm offen)	Link
Tiger Dental	PowerScrew 12 Art.-Nr. 10965 (0.8 mm offen)	Link
Tiger Dental	PowerScrew 14 Art.-Nr. 18215 (0.8 mm offen)	Link
Tiger Dental	PowerScrew 16 Art.-Nr. 10967 (0.8 mm offen)	Link

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=orthoapps_3d&rev=1624626255

Last update: **2021/06/25 15:04**

