

Auswahllisten

Auswahlliste Praxis

OnyxCeph³™ 3D Lab - Doering, John - 10144D

Practice Name:

Patient: 10206: Dolidze, Gvatsa

Image Instruments: Alexi

Customer: 1414

Search...

CA C

Clinic

Cultu.

Danik

David

Orthodontic

Address	Zip Code	City	State
Tulp	63067	Off	
Rick	66386	St.	
Mün	55116	Mair	
Berli	16540	Hoh	
Klotz	42105	Wu	
Hus	04668	Grin	

Die Software OnyxCeph³™ kann parallel mehrere Mandanten verwalten. Neue Mandanten (Praxen, Klienten) werden automatisch durch den Container-Import von Patientendaten von einem anderen Lizenznehmer angelegt. Dies stellt sicher, dass Patientendaten immer ihrer behandelnden Praxis zugeordnet bleiben und beim Rücksenden per Container mit oder ohne erfolgte Änderungen automatisch richtig zugeordnet und synchronisiert werden.

Sollen importierte Daten dauerhaft in der übernehmenden Praxis verbleiben, können diese mittels Thumbnail-Kontextmenü [Senden an|Transfer] in den sog. Home-Client verschoben werden ► [mehr](#)

Auswahlliste Patient

OnyxCeph³™ 3D Lab - Doering, John - 10144D

Practice Name: Image Instruments

Patient: 10144D: Doering, John

10144D: Doering, John
 10000: Demo, fffff
 D-0006Neu: Hannon, Lisa
 10139: Dreher, F
 00007012: Dente
 Ignident_2020: I
 Proaxis: Иркыт
 10152: Proco###
 10014: Doe, Joh
 22222: Patient, I
 History...

Patient's ID	Last Name	First Name	Gender	Model № / L...	Date				
10206	Dc		Female		12.12.				
5046@DICO...	Dr		Female		01.01.				
10139	Dr		Male		23.02.				
10043	Dr		Male		22.05.2005				3
10147	Dr		Male		28.01.2006				18
10108	ds		Male		16.05.2009				0
21212	Du		Male		04.07.2006				2
10109	Ed		Intersexual		12.12.1987				2
22787	EF		Female		24.01.1981				1
D-0005	Eik		Male		25.11.2005				0

Ein Aufruf oder Wechsel des Patienten innerhalb des Programms kann am einfachsten über die Auswahlliste Patient erfolgen. Im Pulldown werden die max. 10 der am Arbeitsplatz zuletzt bearbeiteten Patientendaten (ID: Name, Vorname) angezeigt und können dort ausgewählt und erneut geöffnet werden.

Über den Eintrag Chronik am Ende der Pulldown-Liste kann in einem separaten Fenster eine Übersicht über die innerhalb der vorangegangenen 2 Wochen am aktuellen Arbeitsplatz (oder optional an allen Arbeitsplätzen) bearbeiteten Patienteneinträge angezeigt und zum Wiederaufruf der Patientendaten genutzt werden ► [mehr](#)

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=pulldownmenu>

Last update: **2018/01/08 21:30**

