


Systemoptionen - Tab [Bildtypen]

Auf Systemoptionen-Reiter [Bildtypen] werden diejenigen 2D- und 3D-Bildtypen ausgewählt und konfiguriert, die regelmäßig in der Praxis verwendet werden.

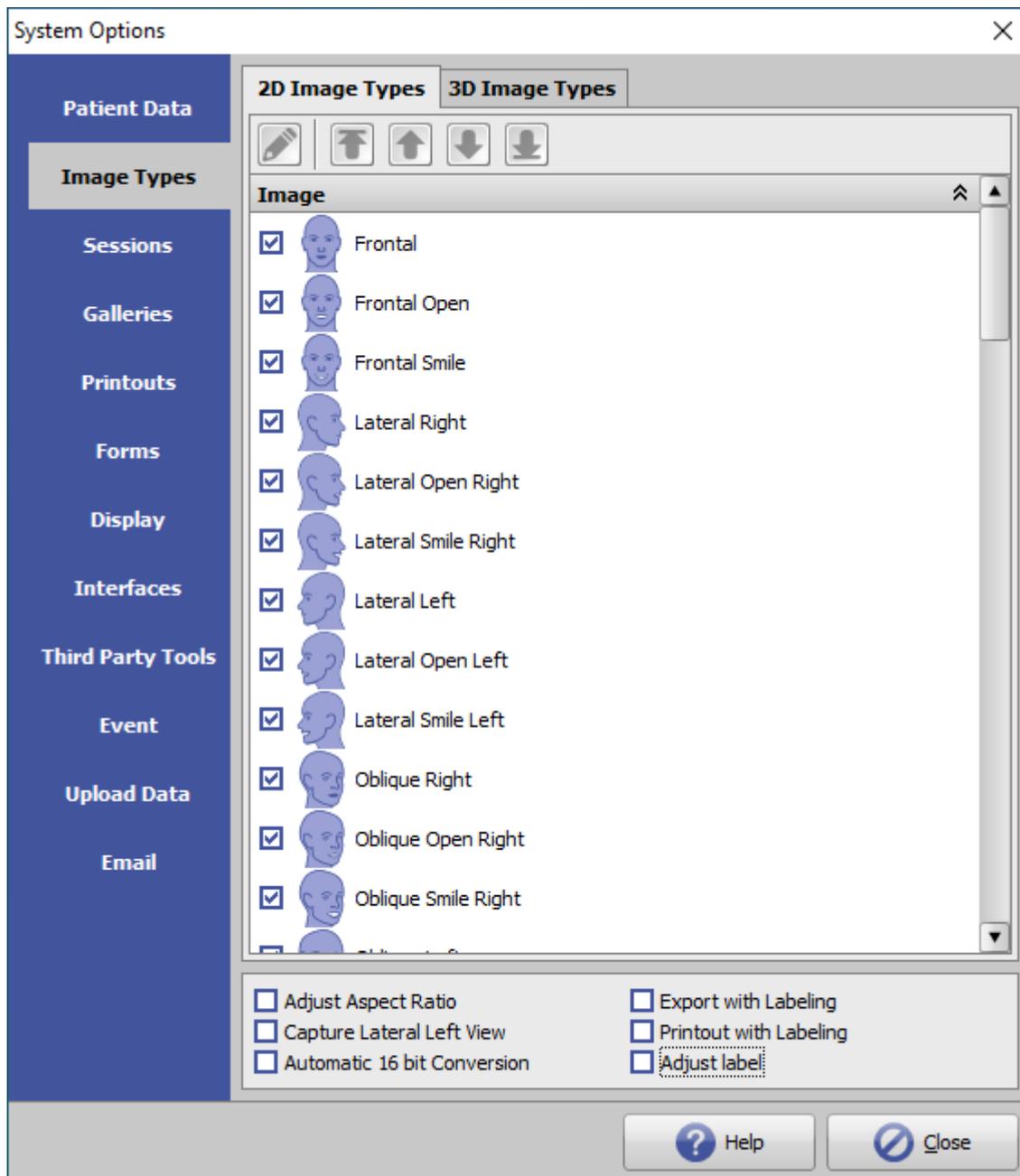

OnyxCeph³™ unterstützt eine Vielzahl verschiedener Bildtypen 2D und 3D, deren Parameter und Eigenschaften vom Anwender für den in der Praxis angewandten Workflow umfangreich angepasst werden können. Für unterschiedliche Funktionen ist eine Klassifizierung in Kategorien hilfreich.

Register 2D Bildtypen

Die [2D Bildtypen](#) werden in die Bildkategorien


- Bild (Klinische Fotos)
- Röntgen
- Intraoral
- Modell

eingeteilt. Die Reihenfolge der Bildtypen innerhalb jeder Kategorie kann mit Hilfe der Pfeiltasten oben geändert werden.

Mit Hilfe der Editor-Taste links davon lassen sich Bildeigenschaften in den Panels

- Allgemein
- Bildaufnahme
- Durchzeichnung
- Slide - Ansicht

im Hinblick auf die dort verwalteten Eigenschaften anpassen.

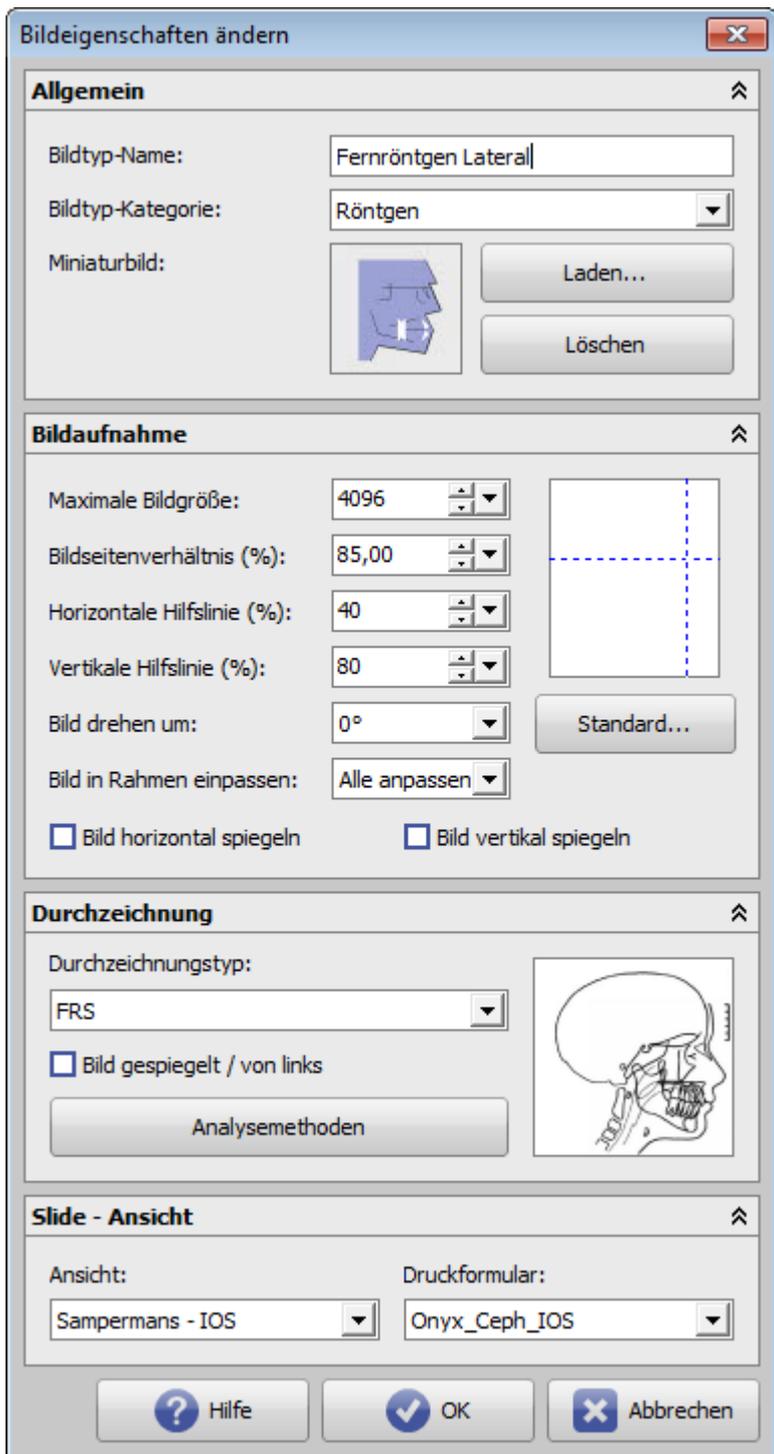

2D Importoptionen

Für den Import von 2D-Bildern können unterhalb der Bildtypliste verschiedene Voreinstellungen getroffen werden:

- Bildseitenverhältnis anpassen
- Aufnahme von links
- Export mit Beschriftung
- Ausdruck mit Beschriftung

3D Bildtypen

Die [3D Bildtypen](#) werden in die Bildkategorien

- Bild (Klinische Fotos)
- Röntgen
- Modell

eingeteilt. Die Reihenfolge der Bildtypen innerhalb jeder Kategorie kann mit Hilfe der Pfeiltasten oben geändert werden.

Mit Hilfe der Editor-Taste links davon lassen sich Bildeigenschaften in den Panels

- Allgemein
- Bildaufnahme
- Durchzeichnung
- Slide - Ansicht

im Hinblick auf die dort verwalteten Eigenschaften anpassen.

Bildeigenschaften ändern

Allgemein

Bildtyp-Name:

Bildtyp-Kategorie:

Miniaturbild: 

Bildaufnahme

Max. Objektanzahl:

Vorgabe-Layout: 1 und 2 separat anzeigen

Licht Ambient:

Licht Diffuse:

Material Ambient:

Material Diffuse:

Durchzeichnung

Slide - Ansicht

Ansicht: Druckformular:

From: <http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link: http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_imagetypes&rev=1610728597

Last update: 2021/01/15 17:36

