

## Systemoptionen - Tab |Schnittstellen|

Auf Systemoptionen-Reiter |Schnittstellen| werden Einstellungen zu Import und Export von Bilddatensätzen, zur Archivierung externer Dokumente zum Patienten und zur Drittprogramm-Kommunikation über info-Server vorgenommen.

### Panel Import

Tasten	Einstellungen
<a href="#">Digitalröntgen</a>	Schnittstellenkonfiguration für digitale Röntgensysteme
<a href="#">Digitalkamera</a>	Schnittstellenkonfiguration für fernsteuerbare Digitalkameras
<a href="#">VDDS-Bildquellen</a>	Schnittstellenkonfiguration für VDDS (BVS) Drittprogramme

Tasten	Einstellungen
<a href="#">CT/PACS/KIS</a>	Schnittstellenkonfiguration für klinische Bildquellen
<a href="#">Face Scanner</a>	Schnittstellenkonfiguration für 3D-Gesichtsscanner
<a href="#">Modell - i/o Scanner</a>	Schnittstellenkonfiguration für Modell- und Intraoralscanner
Checkboxen	Einstellungen
QuickCeph - Unterstützung	QuickCeph-Importkonverter aktivieren
Stammdatenimport über DICOM zulassen	DICOM - Patientendatenimport aktivieren
Lokale Kopie für langsame Bildquellen ...	Workaround für Bildimport von langsamen Datenträgern

## Panel Export

Tasten	Einstellungen
3D Druck	Konfiguration direkter 3D-Export (Drucker, Dienstleister)
Verzeichnisse	Konfiguration 3D-Exportverzeichnis (Exportpfad, dateinamen)

## Panel Archivierung


Zu jedem Patienten können Dateien in einem vordefinierten Archivpfad abgelegt werden. Die Patienten-Unterverordner im Archivpfad können beim Erstellen durch Import der ersten Datei entweder mit der Patienten-ID (empfohlen) oder der Kombination Name\_Vorname\_ID benannt werden.

Es wird empfohlen, für alle Clients denselben Archivpfad (Standard) über seine UNC-Adresse einzutragen, damit alle Arbeitsplätze auf dieselben Daten zugreifen können.

Den im Archiv abgelegten Dateien muss beim Import ein vordefinierter Dokumententyp zugewiesen werden, der auch zur Bezeichnung der Datei im Archivordner benutzt wird.

Zusätzlich zu Dateien können Patient-CDs mit Bildbetrachter im Archivpfad abgelegt werden. Soll ein Drittprogramm als Viewer zum Öffnen der CD-Daten verwendet werden, dann muss dieser ebenfalls hier zugewiesen werden.

Das Ablegen und der Aufruf der Archivdaten erfolgt im Hauptfenster auf Reiter |Patient|

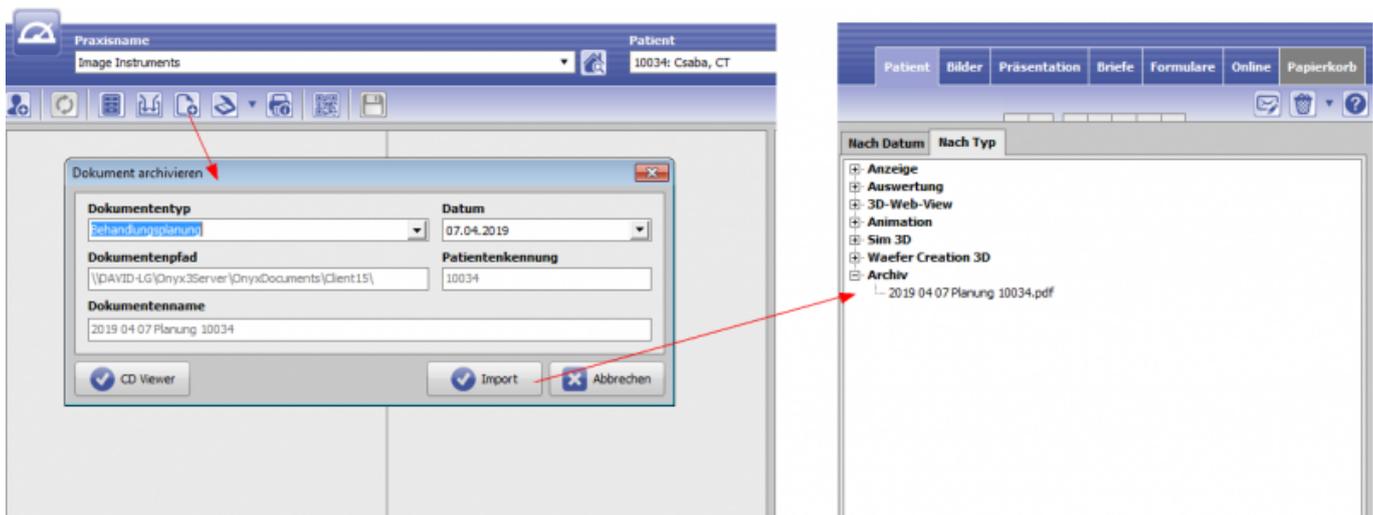

## Panel HTTP Info Server

---

Hier kann die HTTP-Kommunikation mit dem Onyx-Datenbankserver aktiviert und konfiguriert werden:

- Aktivierung
- TCP/IP port
- LAN/WAN

From:  
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab\\_interfaces&rev=1602915948](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_interfaces&rev=1602915948)

Last update: **2020/10/17 08:25**

