


Systemoptionen - Tab |Sitzungen|

Auf Systemoptionen-Reiter |Sitzungen| werden Einstellungen vorgenommen, die das Erscheinungsbild des Hauptfenster-Reiters |Bilder| betreffen.

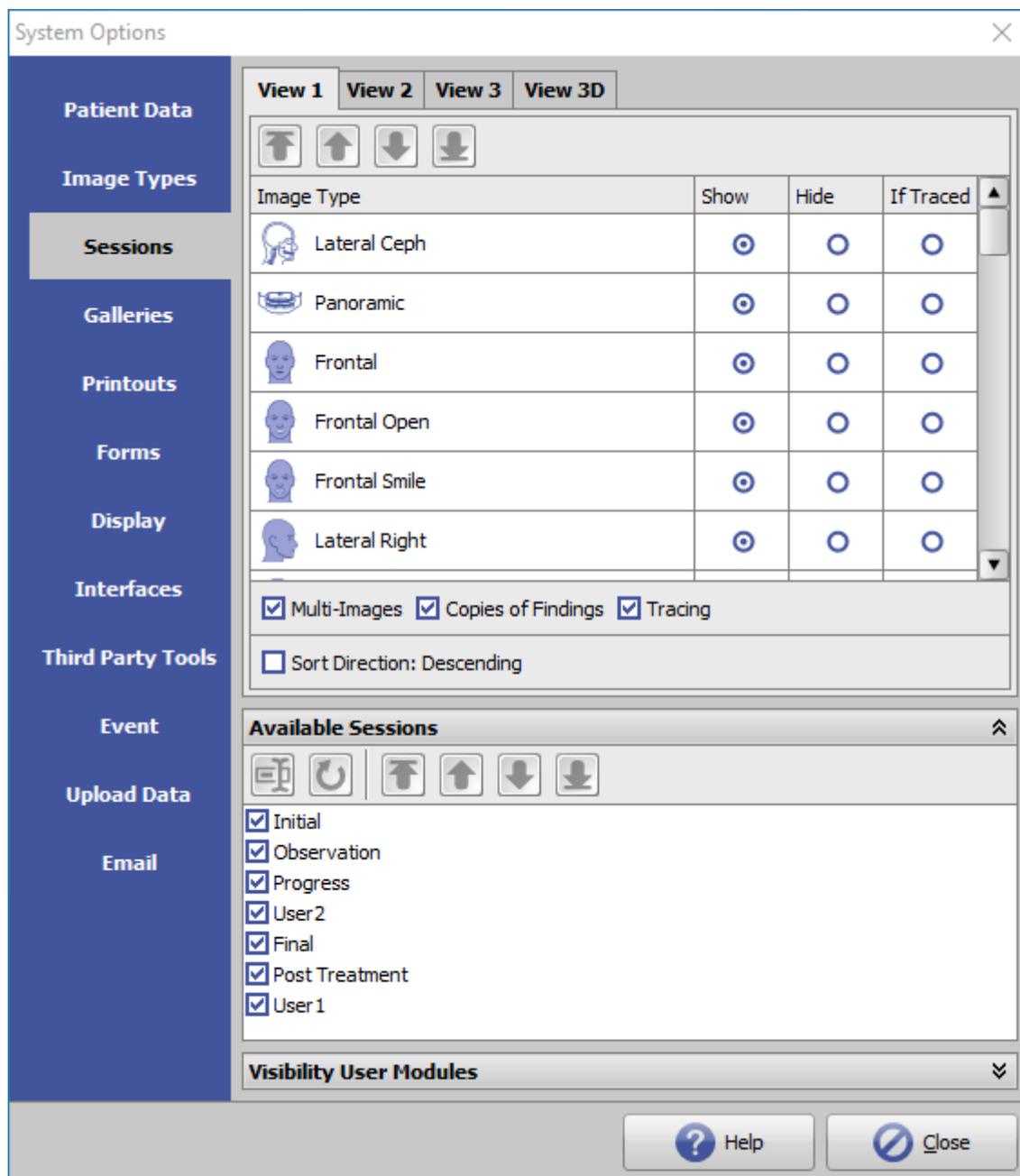

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]\\

Panel Ansichten

Hier können die Ansichten für das Album der Patienten-Thumbnail auf Reiter |Bilder| festgelegt werden (welche Bildtypen sollen in welcher Reihenfolge angezeigt werden). Es können 3 verschiedene Ansichten für 2D-Daten und eine Ansicht für 3D-Daten eingerichtet werden.

Mit den Checkboxes unterhalb der Konfigurationstabelle lassen sich weitere Optionen für die Anzeige festlegen:

- sollen Mehrfachbilder in einer Sitzung angezeigt werden (wenn vorhanden, z.B. mehrere Frontalbilder)

- sollen Befundkopien in einer Sitzung angezeigt werden (wenn vorhanden, z.B. FRS und Kopie desselben FRS)
- sollen Durchzeichnungen (wenn vorhanden) in den Thumbnails gezeichnet werden
- soll die zeitliche Reihenfolge der Sitzungen von oben nach unten oder umgekehrt abgebildet werden

Diese Eistellungen gelten für alle Arbeitsplätze im Netzwerk.

Panel Verfügbare Sitzungen

Im Panel [Verfügbare Sitzungen] können Namen und Reihenfolge der Sitzungen auf Reiter |Bilder| individualisiert werden.

Diese Eistellungen gelten für alle Arbeitsplätze im Netzwerk.

Panel Sichtbarkeit Anwendermodule

Im Panel [Sichtbarkeit Anwendermodule] kann die [Sichtbarkeit von Anwendermodulen](#) in der Iconleiste und im Kontextmenü auf Reiter Bilder gesteuert werden.

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_sessions&rev=1610952725

Last update: **2021/01/18 07:52**

