


# Systemoptionen - Tab |Sitzungen|

Auf Systemoptionen-Reiter |Sitzungen| werden Einstellungen vorgenommen, die das Erscheinungsbild des Hauptfenster-Reiters [|Bilder|](#) betreffen.

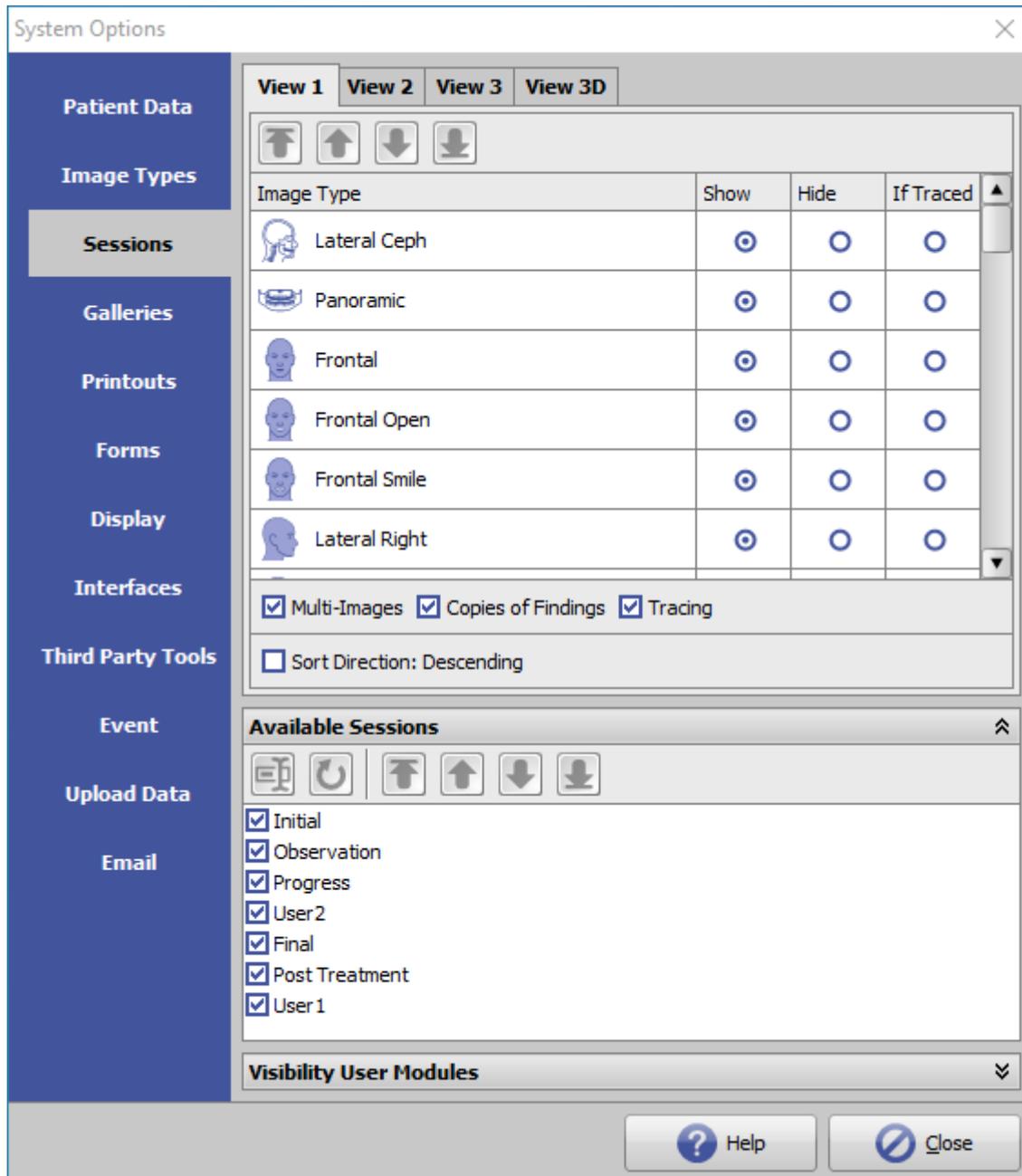


[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

## Panel Ansichten

Hier können die Ansichten für die Bildübersicht der Patienten-Thumbnails auf Reiter [|Bilder|](#) festgelegt werden (welche Bildtypen sollen in welcher Reihenfolge angezeigt werden). Es können 3 verschiedene Ansichten für 2D-

Daten und eine Ansicht für 3D-Daten eingerichtet werden.

In den Hauptfenster-Tabs [Bilder/2D Daten] bzw. [Bilder/3D Daten], können diese Ansichten über das Icon-Menü [Einstellungen] ausgewählt und angewandt werden.

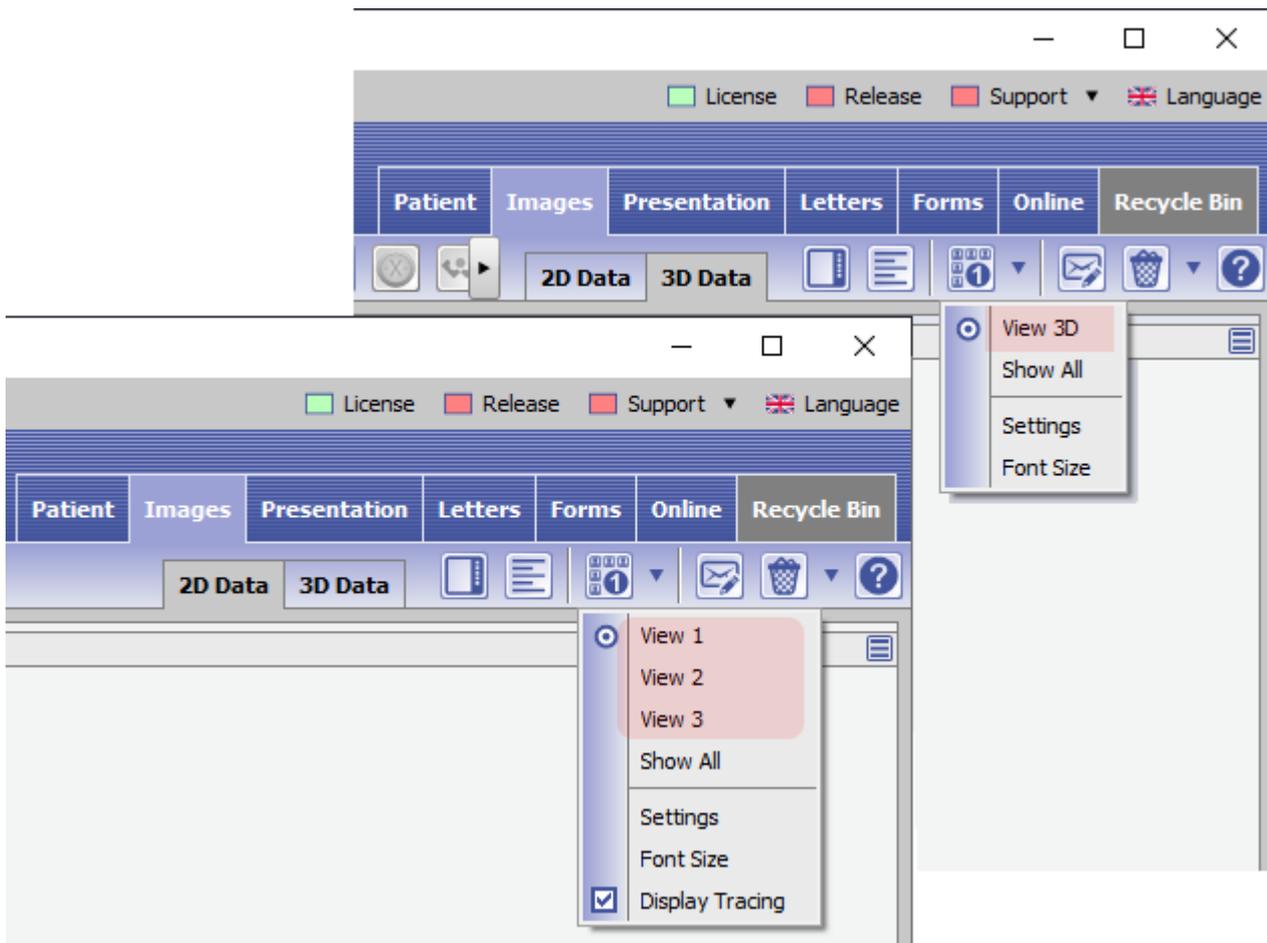

Mit den Checkboxes unterhalb der Konfigurationstabelle lassen sich weitere Optionen für die Anzeige festlegen:

- sollen Mehrfachbilder in einer Sitzung angezeigt werden (wenn vorhanden, z.B. mehrere Frontalbilder)
- sollen Befundkopien in einer Sitzung angezeigt werden (wenn vorhanden, z.B. FRS und Kopie desselben FRS)
- sollen Durchzeichnungen (wenn vorhanden) in den Thumbnails gezeichnet werden
- soll die zeitliche Reihenfolge der Sitzungen von oben nach unten oder umgekehrt abgebildet werden

Diese Eistellungen gelten für alle Arbeitsplätze im Netzwerk.

## Panel Verfügbare Sitzungen

Im Panel [Verfügbare Sitzungen] können Namen und Reihenfolge der Sitzungen auf Reiter [Bilder] individualisiert werden.

Diese Eistellungen gelten für alle Arbeitsplätze im Netzwerk.

## Panel Sichtbarkeit Anwendermodule

---

Im Panel [Sichtbarkeit Anwendermodule] kann die [Sichtbarkeit von Anwendermodulen](#) in der Iconleiste und im Kontextmenü auf Reiter Bilder gesteuert werden.

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab\\_sessions&rev=1613632938](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_sessions&rev=1613632938)

Last update: **2021/02/18 08:22**

