

Animation im OnyxReport anzeigen


Um eine Animation (z.B. aus Modul V.T.O.3D oder Aligner_3D) im OnyxReport anzuzeigen, muss die Animation zunächst im entsprechenden Modul zusammen mit dem Befund gespeichert werden. Ds kann mittels Rechtsklick auf Taste [Als Befund] aktiviert werden.

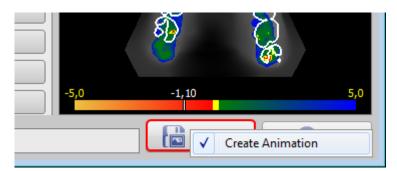

Gespeicherte Animationen werden im Dokumentenbaum auf Reiter | Patient | angezeigt-

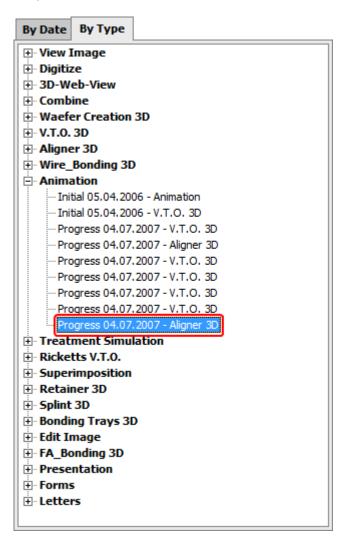

Beim Übergeben des Befundes an OnyxReport muss vor Erstellen des Reports Checkbox [3D View] aktiviert werden.

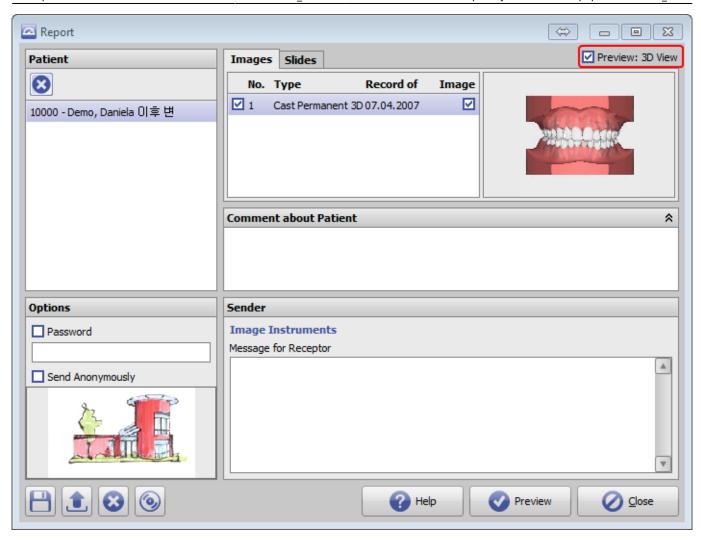

Danach kann über dem Vollbild im OnyxReport die Animation über Kontextmenü analog zum Vollbild in OnyxCeph³™ aufgerufen werden.



http://onyxwiki.net/ Printed on 2023/10/27 16:02