


# QR-Code für Patientenauswahl nutzen

## QR-Code generieren

Um den seriellen Import von Bildern in Modul **Bild hinzufügen 2D** zu beschleunigen, kann ab Version 3.2.43 das Feature QR-Code verwendet werden. Wird der QR-Code auf Reiter |Patient| im Vollbild generiert und als erstes Bild einer Bildserie aufgenommen (als Alternative zum Fotografieren der Karteikarte oder eines Namenszettels), kann beim Einlesen der nachfolgenden Bildserie automatisch oder manuell zum zugehörigen Patienten gewechselt werden.

Alternativ kann das QR-Code-Fenster unabhängig von einem konkreten Fokus im Hauptfenster ab Release 3.2.174+ mittels ShortCut [SHIFT]+[STRG]+[Q] geöffnet werden.

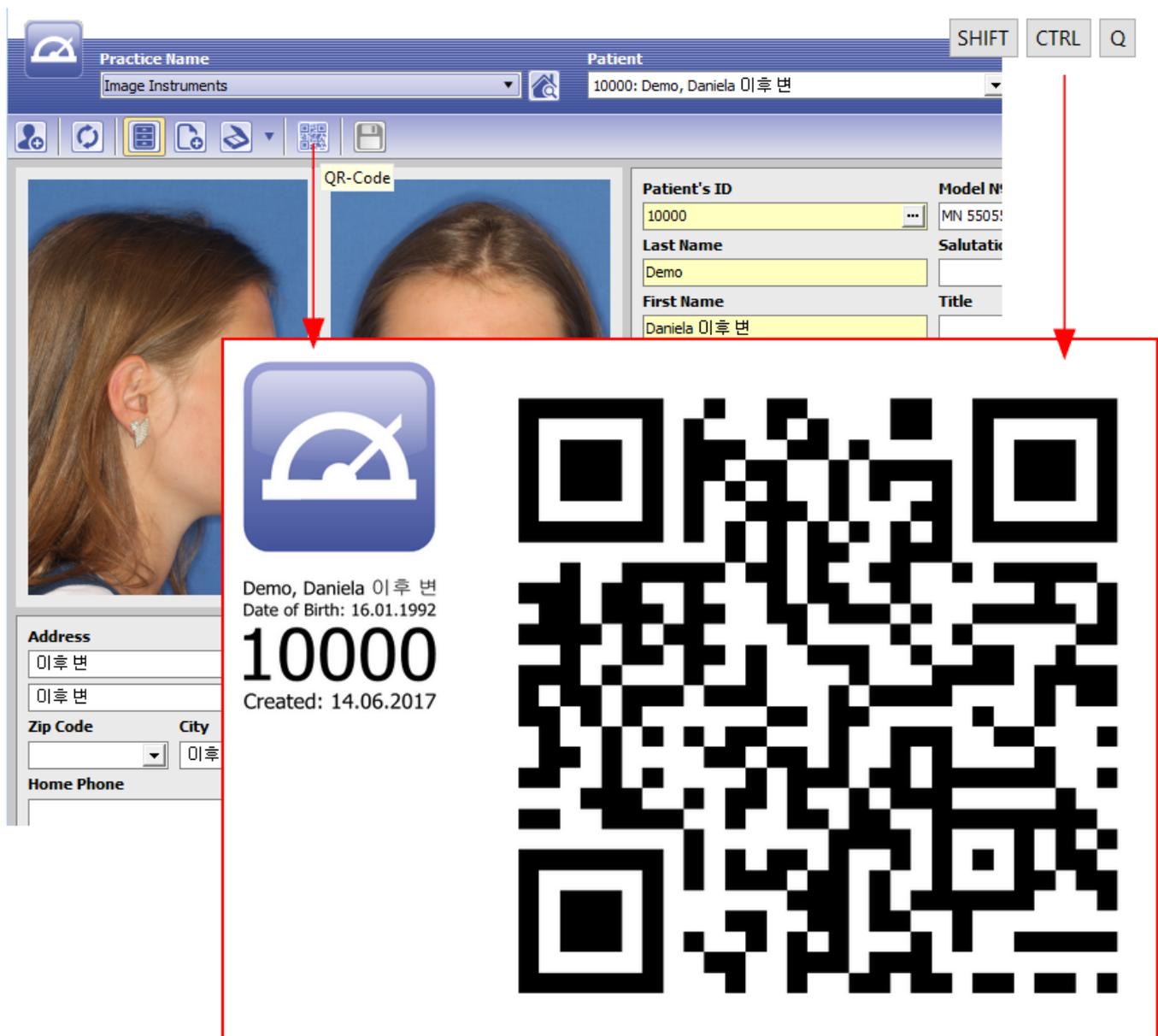

The screenshot shows the OnyxCeph3 software interface. The main window displays patient information for "Demo, Daniela 이후 변" (Patient ID: 10000). A QR-Code window is overlaid on the main window, showing the patient's name, date of birth (16.01.1992), and the patient ID (10000). The QR code is generated based on this information. The QR-Code window also includes a logo and the text "Created: 14.06.2017".

Practice Name: Image Instruments  
Patient: 10000: Demo, Daniela 이후 변

QR-Code

Patient's ID: 10000  
Model N: MN 5505!

Last Name: Demo  
Salutatio:

First Name: Daniela 이후 변  
Title:

Address: 이후 변  
이후 변  
Zip Code: City: 이후  
Home Phone:

Demo, Daniela 이후 변  
Date of Birth: 16.01.1992  
**10000**  
Created: 14.06.2017


SHIFT CTRL Q

## Manuelles Wechseln

Um manuell zu dem im QR-Code verschlüsselten Patienten zu wechseln, kann im Kontextmenü des QR-Thumbnail der Eintrag [Patient wählen] benutzt werden.

## Automatisches Wechseln

Um vor Einlesen einer Bildserie entsprechend der ausgewählten Abfolge von konkreten Bildtypen (Batchimport) automatisch zu dem im QR-Code verschlüsselten Patienten zu wechseln, muss mit der Icon-Taste [QR-Code benutzen] ober rechts der Bildtyp-Platzhalter für das QR-Foto aktiviert werden (roter Pfeil). Damit wird beim Start des Batch-Importes als erste Aktion vor dem Importieren der Bildfolge der Patientenwechsel ausgeführt.

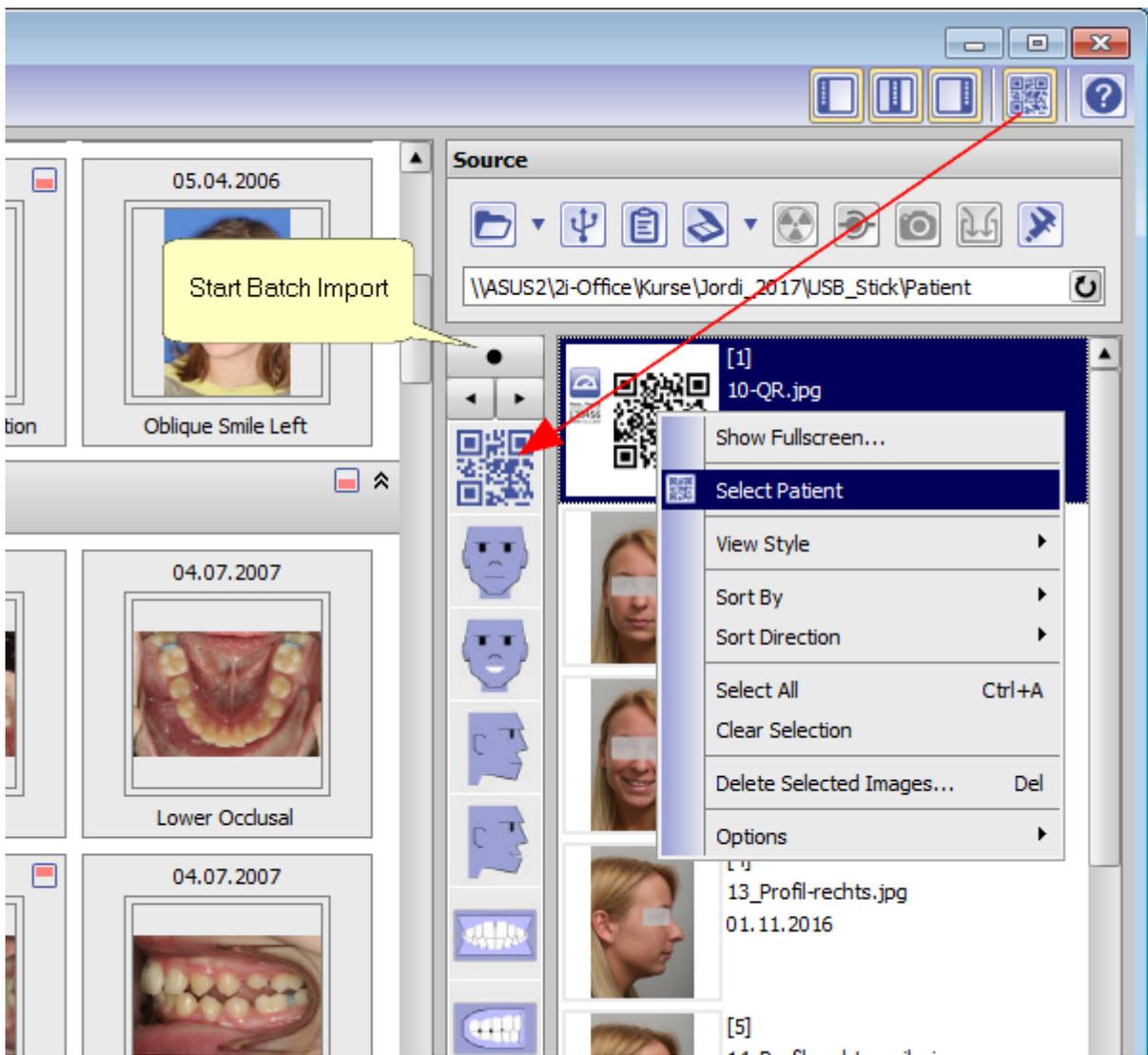

From: <http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link: <http://onyxwiki.net/doku.php?id=3581>

Last update: 2022/12/19 06:57



