

# Export von Bildern in ein Verzeichnis

---

Erweiterung konfigurierbare Systemoptionen-Tools auf Reiter |Drittprogramme| Panel 2., mit der die Konfiguration eines Standard-Exportpfades unter Nutzung von [Platzhaltern](#) für Verzeichnis und Datei ermöglicht werden soll.


## Anwendungsbeispiel Schnittstelle IIE-Systems (Dr. Visse)

- <https://www.iie-systems.de>
- <https://www.dr-visse.de/>

Das System erstellt unter Nutzung von Bildern in einem verlinkten Verzeichnis Präsentationen zur Anzeige im Browser.

Der Patient/Partner erhält eine Link und kann sich die Bilder dort als Karussell oder Raster darstellen lassen.


Um Onyx-Bilder (z.Z. nur 2D) übergeben zu können, unter Systemoptionen|Drittprogramme einen Speicherpfad mit Platzhalter für die Dateibezeichnung vorgeben:

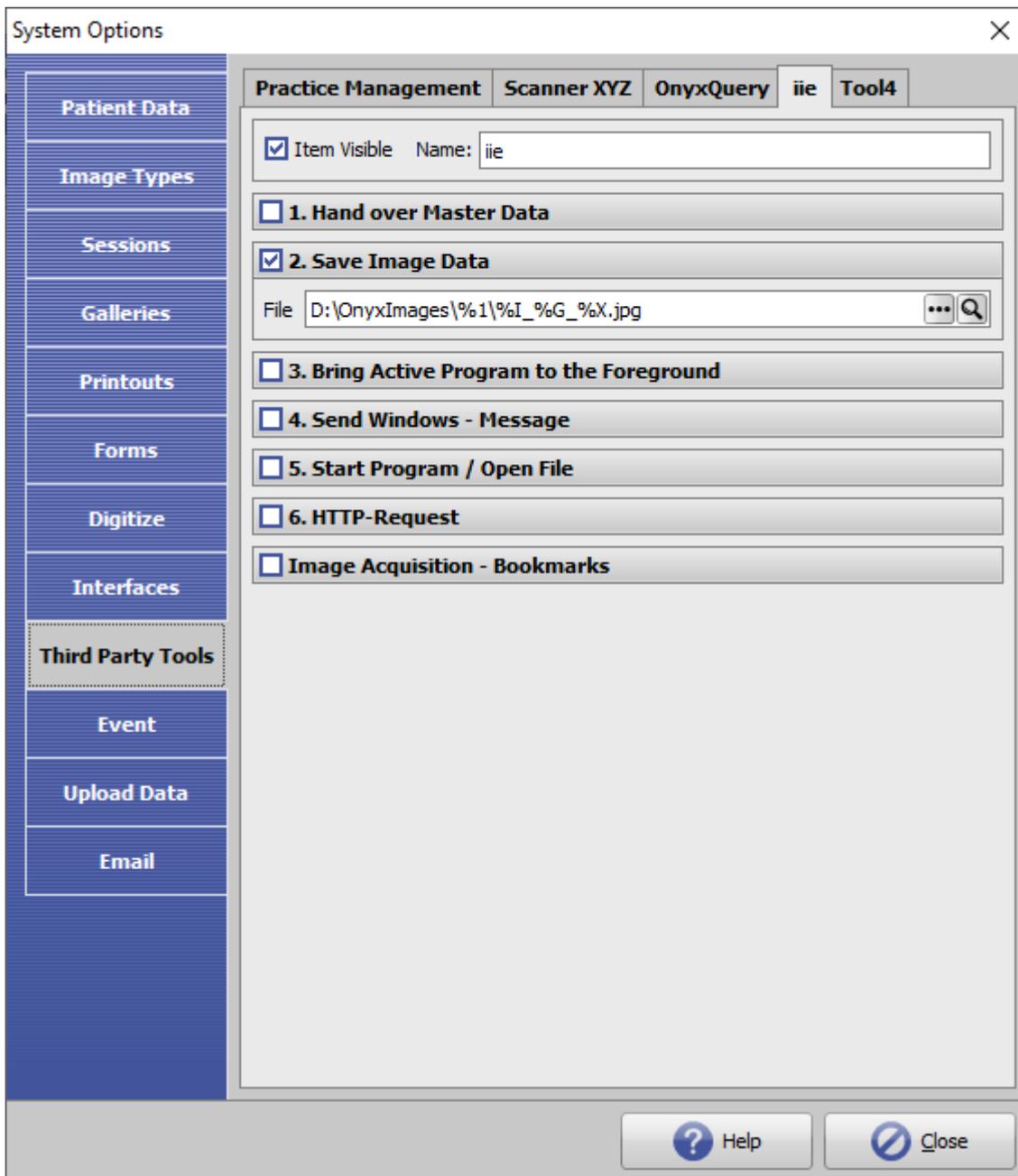

Geeignete [Platzhalter](#) zur Unterscheidung mehrerer Bilder:

Kürzel	Bedeutung
%L	Fortlaufender Index 1,2,3, ...
%6	Bildname (PicFName)
%7	Bildcode (PatID+Systemcode)
%G	Name der Sitzung
%I	Bildtyp

Aufruf über Auswahl der zu übergebenden Bilder auf Reiter [Bilder/2D-Daten] und Übergabe über Menüpunkt [Gehe zu ...]

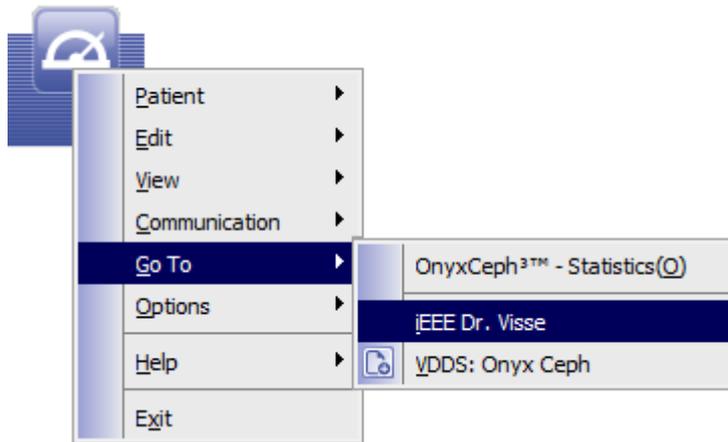

From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:  
<http://onyxwiki.net/doku.php?id=4657>

Last update: **2021/06/21 08:52**

