2024/05/12 14:23 1/2 Modul Bild anpassen 2D

Modul Bild anpassen 2D




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	Ø	Ø	4	Ø	4


In Modul Bild anpassen 2D lassen sich Bilder einzeln oder als Galerie-Anordnung im Bezug auf Ausrichtung (Positon, Rotation, Zoom, Spiegelung) und Darstellung (Kontrast, Helligkeit, Farbton, Sättigung) innerhalb eines Rahmens mit bildtypspezifischem A/R anpassen. Bei Einzelbildanpassung kann das A/R des Originalbildes beibehalten werden. Alle Anpassungen werden bei Übernahme mit [OK] als Crop-Parameter zum jeweiligen Bilddatensatz in der Datenbank abgelegt und bei jedem späteren Bildaufruf innerhalb von OnyxCeph³™ sowie bei Export angewandt, während das zugrundeliegende Originalbild unverändert bleibt. Alle über Crop-Parameter hinterlegten Anpassungen können im Modul einzeln oder in Gruppen rückgängig gemacht werden.

Erste Schritte

- 1. Art der Anpassung auswählen (Einzelbild, Galerie-Template)
- 2. Ausrichtung der Bilder anpassen
- 3. Option: Hilfslinien einblenden
- 4. Darstellung der Bilder anpassen
- 5. Option: Galerie als Präsentation speichern
- 6. Anpassung übernehmen

Moduloberfläche

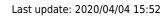

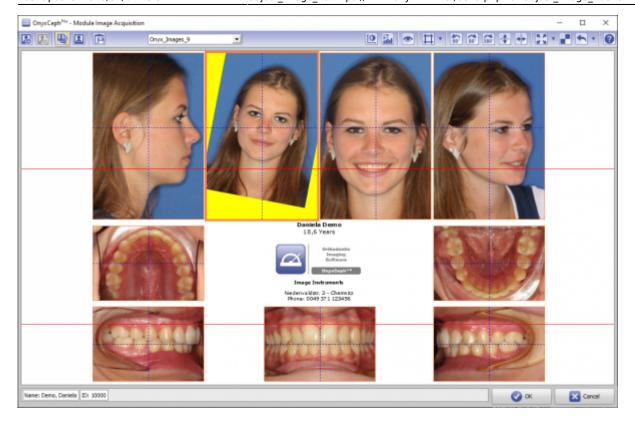

Verweise



https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_Digitize_Fotos_FRS_DE.pdf

From

https://www.onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=adjust_image_2d&rev=1586008321

Last update: 2020/04/04 15:52



https://www.onyxwiki.net/ Printed on 2024/05/12 14:23