

Modul Bracket Erase



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	📦	📦	📦

✗ nicht
enthalten

📦 immer
enthalten


📦 optional
enthalten

Das Modul Bracket Erase dient der Entfernung von im aktuellen Scan erfassten Bracket- und Bandgeometrien, um Behandlungsapparaturen (z.B. Finishing-Schienenfolge, Retainer, ...) zu designen und noch vor Abnahme der festsitzenden Apparatur zu fertigen. Hierzu wird vorteilhafterweise neben dem aktuellen Scan ein Ausgangsscan der Malokklusion vor Beginn der festsitzenden Behandlung verwendet.

Erste Schritte

1. Ausgangsscan (ohne Brackets) sockeln, segmentieren
2. Aktuellen Scan (mit Brackets) sockeln, segmentieren
3. Modul mit aktuellem Scan öffnen und optional Ausgangsscan als Referenzdatensatz nachladen
4. Brackets automatisch (nur mit Referenz) oder manuell markieren
5. Bänder entfernen mit der Option "Ganzen Zahn entfernen"
6. "Referenz anzeigen" zeigt die Einpassung der Referenzoberfläche

Moduloberfläche

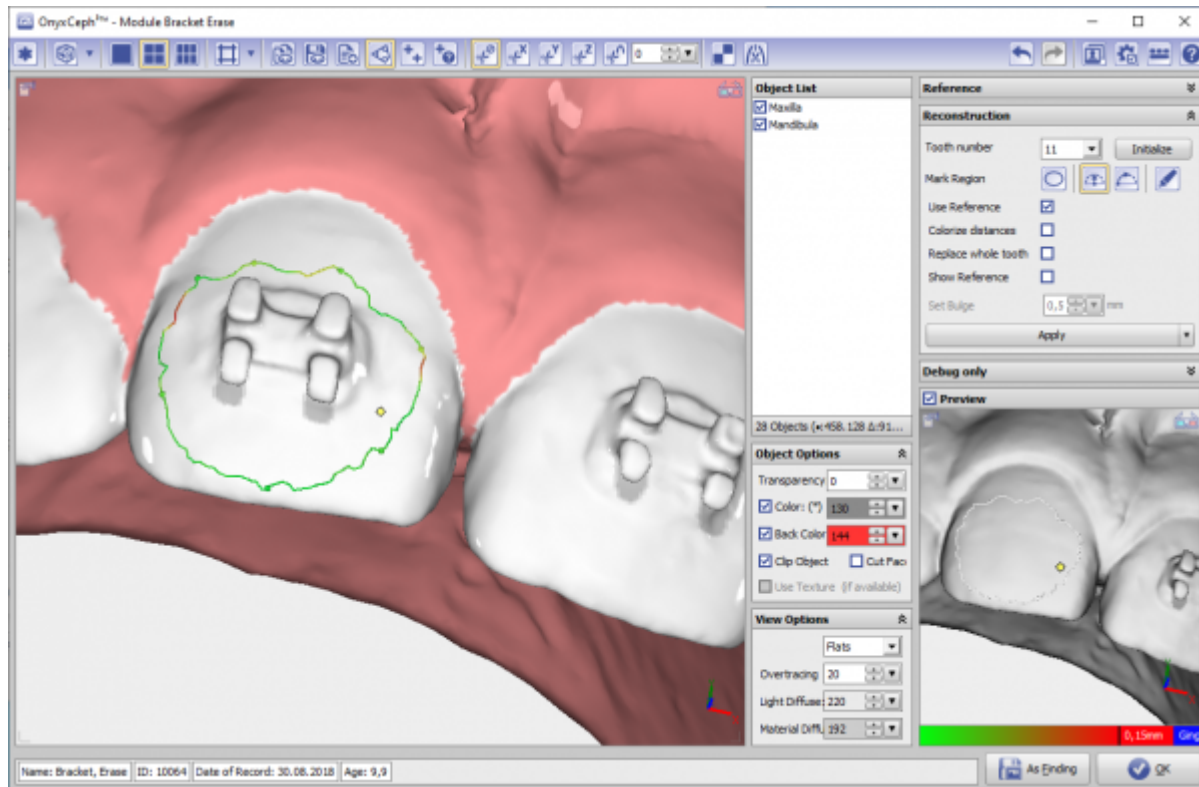

Verweise

	Modul Handout Bracket Erase
	Bracket Erase

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=bracketerase>

Last update: **2023/03/09 14:45**

