Backup-Konzept

Das Einrichten eines Backups für die auf dem Datenbankserver gespeicherten Daten sollte unmittelbar nach Installation der produktiven Datenbankinstanz erfolgen, um bei Hardware- und Softwareausfällen alle Daten kurzfristig und vollständig wiederherstellen zu können. Die ordnungsgemäße Umsetzung und Aktivierung des gewählten Backup-Konzeptes liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Zu sichernde Verzeichnisse

Sämtliche lokalen und globalen Daten und Einstellungen liegen in der Onyx-Datenbank auf dem Datenbankserver im Standard-Installationsverzeichnis ..\Onyx3Server.

Wurden die Pfade für die Datenbank ..\OnyxDB und/oder Bilder ..\Pictures bei der Installation auf andere Positionen verschoben (z.B. auf eine andere Partition oder auf ein NAS), dann liegen die betreffenden Informationen physisch an diese Stelle.

Um alle erforderlichen Daten zu sichern, damit diese im Fall eines Hardware- oder Softwareproblems auf dem selben oder auf einem neuen Rechner verlustfrei wiederhergestellt werden können, gibt es mehrere Sicherungskonzepte, die je nach Anforderungen in der konkreten Einrichtung ausgewählt, konfiguiert und angewandt werden sollten.

Es wird empfohlen, für ein korrektes Setup einen in IT-Fragen qualifizierten Mitarbeiter zu konsultieren, der über die erforderlichen Kenntnisse und Zugriffsrechte verfügt.

File-Backup

Bei einem File-Backup werden die Verzeichnisse

- ..\OnyxDB und
- ..\Pictures

an ihrem konfigurierten Standort manuell oder mittels exterer Backup-Software komplett oder differentiell auf ein Sicherungsmedium kopiert. Dabei sollte es sich möglchst um einen externen Datenträger handeln, der auch außerhalb der Einrichtung aufbewahrt wird, um einen Verlust bei Ereignissen wie Brand, Einbruch etc. auszuschließen.

Eine differentielle Sicherung wird nur für den Bildpfad empfohlen, während der Datenbankordner immer komplett kopiert werden sollte.



Details

Datenbank-Ordner sichern

Da es sich bei der von OnyxCeph³[™] benutzten NexusDB-Datenbank um eine SQL-Datenbank handelt, darf der Ordner OnyxDB nicht kopiert werden, solange der Datenbankserver OnyxDBServer läuft. Dieser muss also manuell mittels Bedienprogramm Onyx3Config gestoppt werden, egal ob er als Programm oder Dienst gestartet wurde.

S Onyx Server Configuration	- 🗆 X					
Status Information						
Server not Started						
Database not Active						
D:\2I_Prog\Onyx3Server\OnyxDB\						
Server Control						
Start Service	Start Server as Program					
Uninstall Service						
Service 'OnyxD8Server3' is not running.						
Server Update						
Installed version is up to date						
Check for updates	Start Update					
3.2.174 (477)						
Support	Help 🖉 Close					

Nach Abschluss der Sicherung muss der Datenbankserver OnyxDBServer wiederum manuell mittels Bedienprogramm Onyx3Config gestartet werden. Alternativ kann der Neustart des Datenbankservers wenn möglich aucn durch das externe Backup-Software erfolgen.

tatus Information					
Temporary License	e (OSL) Valid				
Database Active					
D:\2I_Prog\Onyx3Server\OnyxDB\					
erver Control					
Stop Service	Start Server as Program				
Uninstall Service					
Service 'OnyxD8Server3' is running.					
ierver Update	Installed version is up to date				
ierver Update Installed version is	s up to date				
ierver Update Installed version is Check for updates	s up to date Start Update				
Installed version is Check for updates V 3.2.174 (477)	s up to date Start Update				

Bilder-Ordner sichern

Der bzw. die Ordner ..\Pictures entalten alle Bilddaten und können auch bei laufendem Datenbankprogramm OnyxDBServer kopiert werden. Die konfigurierten Bildpfade können in der Bedienoberfläche sdes Serverprogramms ausgelesen werden.

📄 OnyxCeph ^a ™ - D	atabase Server			-		×		
Server User Da	tabases Status	Settings M	essages	Backup				
Options Start Opt	ions Directories	Connection				_		
Directory of Ony	/xCeph³™ datab	ase (+On	yxDB\)					
D:\2I_Prog\Onyx3Server\								
Directories of O								
Directories or U	Directories of OnyxCeph ² ^m Images							
D: \21_Prog \0	D:\2I_Prog\Onyx3Server\Pictures\							
OnyxCeph ^{3™} - V	OnyxCeph³™ - Workstation - Installation Files							
	Select Direct	tories						\times
	Save	D:\2I_Prog)\Onyx3Se	rver\Pictur	es\			
	Search							
Stop Serve								
Sup serv								
	D	Change	20	Delete		🗸 ок	Cancel	

Live-Backup

Bei einem Live-Backup werden die Verzeichnisse

- ..\Backup und
- ..\Pictures

an ihrem konfigurierten Standort manuell oder mittels exterer Backup-Software komplett oder differentiell auf ein Sicherungsmedium kopiert. Dabei sollte es sich möglchst um einen externen Datenträger handeln, der auch außerhalb der Einrichtung aufbewahrt wird, um einen Verlust bei Ereignissen wie Brand, Einbruch etc. auszuschließen.



Details

Datenbank-Ordner sichern

Anstelle des Datenbankordners ..\OnyxDB wird beim Live-Backup der im Datenbankserverprogramm OnyxDBServer vorkonfigurierte Backup-Ordner gesichert, der eine 1:1-Kopie des Datenbankordners OnyxDB im Format O3B enthält. Zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Redundnaz diese Live-Kopie der Datenbank erstell wird, wird auf dem entsprehcenden Reiter des Datenbankserverprogramms festgelegt. Beim Live-Backup muss der Datenbankserver OnyxDBServer also im gegensatz zum File-backup nicht gestoppt und nach Abschluss des Kopiervorganges wieder gestartet werden.

Bilder-Ordner sichern

Der bzw. die Ordner ..\Pictures entalten alle Bilddaten und können auch bei laufendem Datenbankprogramm OnyxDBServer kopiert werden. Die konfigurierten Bildpfade können in der Bedienoberfläche sdes Serverprogramms ausgelesen werden.

OnyxCeph ^{3™} - Database Server —						
Server User Databases Status Settings Messages Backup						
Options Start Options Directories Connection						
Directory of OnyxCeph ^{3™} database (+ OnyxDB\)						
D:\2I_Prog\Onyx3Server\						
Directories of OnyxCeph ² ⁱⁿ Images						
D:\2I_Prog\Onyx3Server\Pictures\						
OnyxCeph ^{3™} - Workstation - Installation Files						
Select Directories	×					
Save D:\2I_Prog\Onyx3Server\Pictu	res\					
Search						
Stop Serve						
Change Selete	OK Cancel					

Manuelle Datensicherung

Öffnen der Bedienoberfläche des Datenbankprogramms OnyxDBServer (wie oben beschrieben) und Starten der manuelle Sicherung mittels Tastenklick auf Register |Manuell|.

Datenrücksicherung

Öffnen der Bedienoberfläche des Datenbankprogramms OnyxDBServer (wie oben beschrieben) und Starten der Datenwiederherstellung aus einer Onyx-Sicherungsdatei *.OnB mittels Tastenklick auf Register |Manuell|.

Hinweise

Die Datenwiederherstellung kann nur erfolgen, wenn das Datenbankprogramm vorher gestoppt wurde. Wurden die Bilder, wie oben empfohlen, separat gesichert, muss das gesicherte Bildverzeichnis ..\Pictures vorm Neustart des Datenbankprogramms manuell zurückkopiert werden.

Die Sicherungsdatei *.OnB kann durch Umbenennen in *.zip als Archiv manuell entpackt werden. Die archivierten Verzeichnisse ..\OnyxDB und ..\Pictures können in eine Neuinstallation einkopiert werden, um die Datenwiederherstellung manuell durchzuführen (s.a. **7** Onyx-Datenbankserver 3.2 verschieben).

Backup deaktivieren

Wenn Sie das Serververzeichnis im Rahmen eines externen Backups ohnehin täglich sichern, sollten Sie das interne Backup in den Einstellungen des Datenbanksevers deaktivieren, um Festplattenplatz zu sparen.

From: http://onyxwiki.net/ - [OnyxCeph^{3™} Wiki]

Permanent link: http://onyxwiki.net/doku.php?id=dbbackup

Last update: 2023/04/11 15:47



Backup-Konzept