


Icon-Tasten [Referenzlinien]


Icon	Funktion
	Referenzlinien 3D-View
	Mittellinien 3D-View

Mit Icon-Taste [Referenzlinien] können (durchgehende rote) Referenzlinien im 3D-View ein- und ausgeblendet werden. Die Referenzlinien stellen eigentlich die sichtbare Kante einer Ebene des Objektkoordinatensystems bei paralleler Ausrichtung zum Bildkoordinatensystem dar. Sie können im Pulldown-Menü der Icon-Taste definiert und im 3D-View per Drag&Drop verschoben werden. Dabei wird im Hint über der Linie der orthogonale Abstand zur Koordinatensystem-Mitte in mm angezeigt.

Wird das Objektkoordinatensystem aus dem Bildkoordinatensystem herausgedreht, verschwindet die Anzeige der Referenzlinien automatisch. Alle vordefinierten Referenzlinien lassen sich per Pulldown-Menüeintrag Löschen.

Mit icon-Taste [Mittellinien 3D-View] werden in jedem 3D-View 3D-View-Panel (blaue unterbrochene) Mittellinien in der Bildebene ein- und ausgeblendet. Diese Hilfslinien können u.a. zur Orientierung beim Ausrichten von Brackets in Modul FA_Bonding verwendet werden.

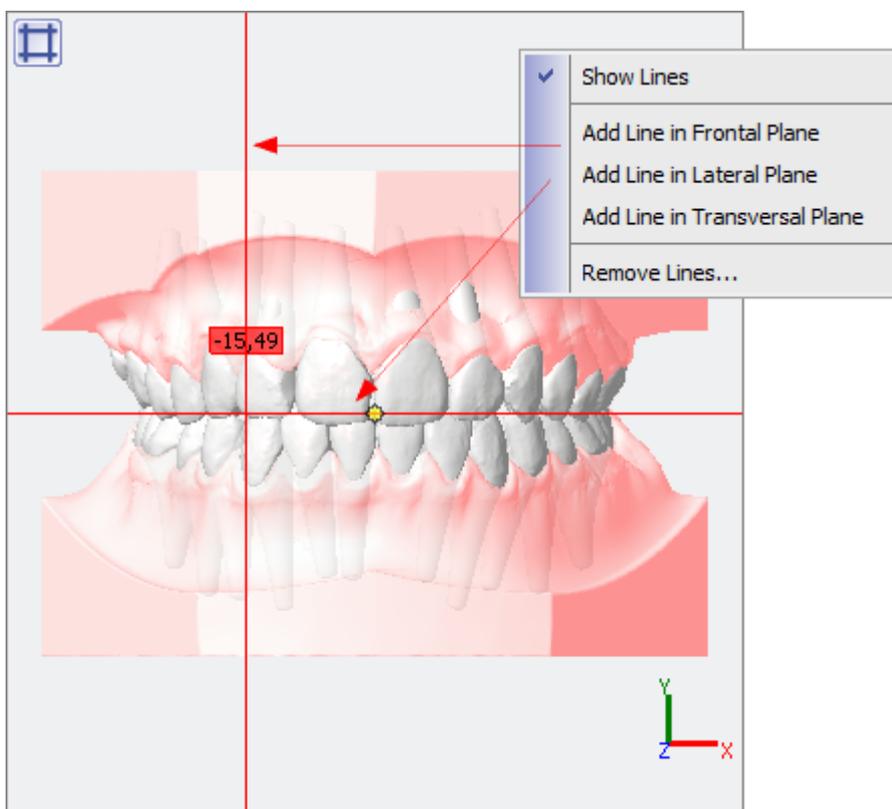

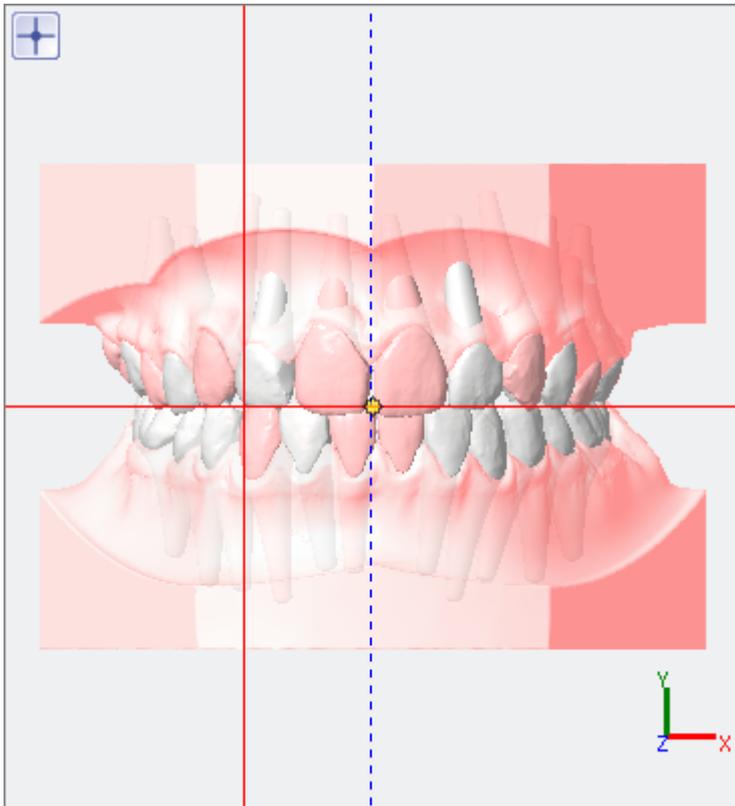

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://onyxwiki.net/doku.php?id=ic_008

Last update: **2015/10/27 09:05**

