

# Schnittstellenkonfiguration CT|PACS|KIS: PACS

CT / PACS / KIS
✕

PACS
HL7



Digital Imaging and Communications in Medicine

**PACS - Support Activated**

PACS Address

PACS Port

PACS AE-Title

Client AE-Title

Client Receiving Port

Patient ID:

Parameter	Einstellung
PACS - Unterstützung aktiv	PACS Schnittstelle aktivieren
PACS - Address	IP-Adresse oder Rechnername des PACS
PACS - Port	Das Port, auf dem das PACS auf Anfragen wartet
PACS - AE-Title	<b>Anwendungs Entität</b> Name des PACS
Client - AE-Title	<b>Anwendungs Entität</b> Name des OnyxCeph-Arbeitsplatzes
Client Receiving Port	Das Port auf dem Client, an das das PACS Bilddaten schicken soll
Taste [Echo]	<i>Funktionstest:</i> Es wird eine ECHO-Anfrage an das PACS geschickt
Patient ID:	<i>Funktionstest:</i> Hier die ID eines im PACS bekannten Patienten eingeben
Taste [Patientennummer]	<i>Funktionstest:</i> Daten des Patienten mit der ID werden abgefragt
Taste [Query Image]	<i>Funktionstest:</i> Ein Bild des Patienten mit der ID wird angefragt und empfangen

From:  
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=pacs>

Last update: **2022/08/22 11:35**

