

Panel Referenzpunktkoordinaten

Das Panel zeigt die Koordinaten des in der [Referenzpunktliste](#) gewählten Punktes an. In der mittleren Spalte werden die Positionen in Pixel (2D-Bilder) und in der rechten Spalte in Koordinaten entsprechend der für das Bild eingetragenen Kalibrierung angezeigt. Der Ursprung des verwendeten Bildkoordinatensystems liegt dabei oben links.

N		
Position X:	720,75 px	121,5 mm
Position Y:	121,50 px	20,5 mm

Bei 3D-Datensätzen wird die im Datensatz hinterlegte Metrik für die Anzeige in beiden Spalten benutzt. Wird das Panel im Zusammenhang mit [Bracket- und Attachmentlisten](#) verwendet, beziehen sich die Angaben auf die FA-Position des zugehörigen Einzelzahnes.

11I			Tooth 14		Waefer Punkt 2 Maxilla	
Position X:	-4,91	-4,9 mm	Position X:	-25,59 mm	Position X:	
Position Y:	-0,60	-0,6 mm	Position Y:	3,33 mm	Position Y:	
Position Z:	25,87	25,9 mm	Position Z:	10,47 mm	Position Z:	

Header-Icons	
N	Kurzbezeichnung Referenzpunkt ¹
	Gehe zu nächstem nicht gesetzten Referenzpunkt
	Gehe zu nächstem Referenzpunkt
	Wiedergabe Soundfile ² für Referenzpunkt
	Gehe zu vorherigem Referenzpunkt
	Gehe zu vorherigem nicht gesetzten Referenzpunkt

¹ Sind alle in der Liste aufgeführten Referenzpunkte eingegeben, steht an dieser Stelle "Fertig"

² Soundfiles für den jeweiligen Referenzpunkt müssen vom Anwender zuvor über das Kontextmenü der [Referenzpunktliste](#) eingespielt worden sein.

Landmarks

11vMG Vestibular Gingival Margin

11I Incisal Edge of 11

corRot11 Coronal Rotation Point

apRot11 Apical Rotation Point of

11m Mesial Point of 11

21m Mesial Point of 21

21I Incisal Edge of 21

corRot21 Coronal Rotation

21vMG Vestibular Gingival

apRot21 Apical Rotation P

21d Distal Point of 21

22m Mesial Point of 22

22I Incisal Edge of 22

corRot22 Coronal Rotation

22vMG Vestibular Gingival

apRot22 Apical Rotation P

22d Distal Point of 22

23m Mesial Point of 23

Help to 11I

Delete 11I

Update Structure-Points

Load Sound for 11I...

Play Sound for 11I

Delete Sound for 11I

noXRayCeph Import

Delete All Landmarks

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://onyxwiki.net/doku.php?id=panel_landmark

Last update:

2015/12/29 12:27

