


# Optionen Durchzeichnung

Über Taste [Optionen] in Panel Durchzeichnung lassen sich auf einzelnen Reitern verschiedenste Einstellungen in Hinblick auf Grafik-Overlays über 2D- und 3D-Bildfenstern vornehmen.

## Reiter |Hilfsfenster|

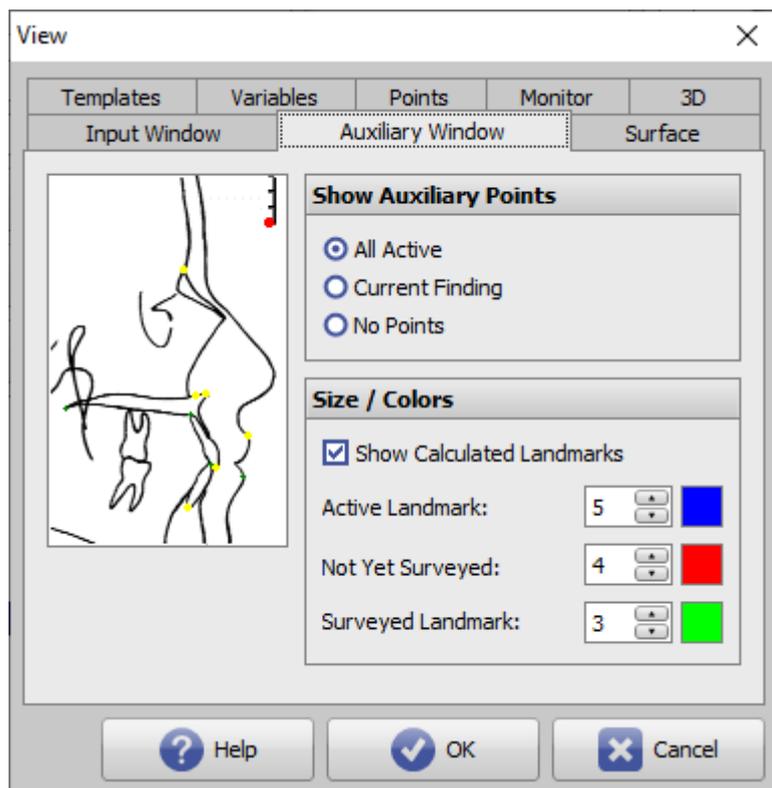


[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

## Panel Hilfspunkte anzeigen

Hier kann festgelegt werden, welche Punkte in der Durchzeichnungsskizze im Mittelpanel in Modul Auswertung angezeigt werdn sollen.

Die Einstellungen betreffen den lokalen Arbeitsplatz.

Auswahl	Bedeutung
alle aktiven	Alle Referenzpunkte aller ausgewählten Analysen werden angezeigt
aktueller Befund	Nur die Referenzpunkte des aktiven befundes werden angezeigt
keine Punkte	es werden keine Referenzpunkte angezeigt

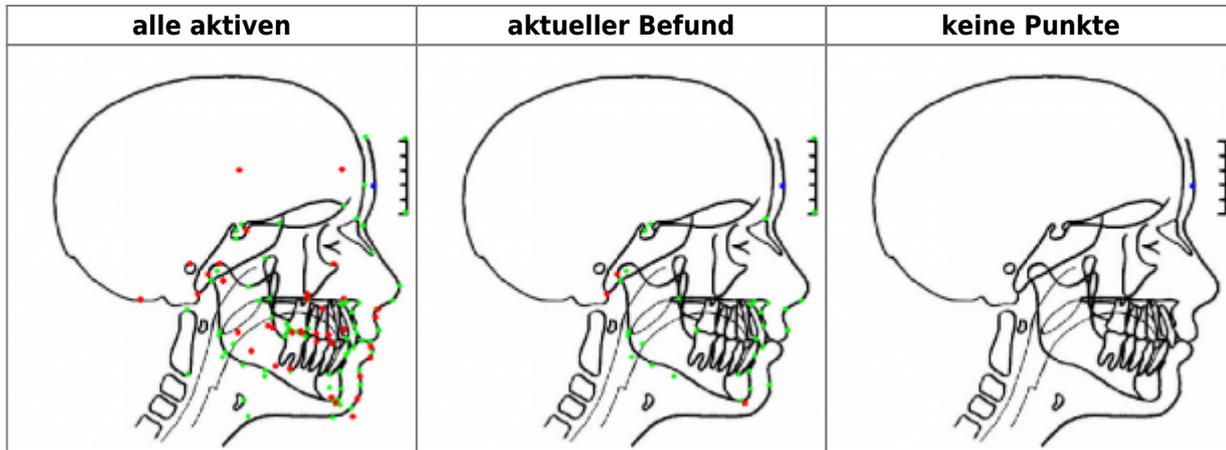

### Panel Größe / Farben

Je nach Desktop-Auflösung und Schriftgrößeneinstellung kann eine Anpassung von Größe und Farben der Punkte in der Durchzeichnungsskizze gewünscht sein. Außerdem kann festgelegt werden, ob auch berechnete Punkte in der Skizze merkiert werden sollen oder nicht.

Die Einstellungen betreffen den lokalen Arbeitsplatz.

Auswahl	Einstellung	Bedeutung
Aktiver Punkt	8 	Größe und Farbe des in der Liste aktiv ausgewählten Referenzpunktes
Ungesetzter Punkt	7 	Größe und Farbe der noch nicht gesetzten Referenzpunkte
Gesetzter Punkt	6 	Größe und Farbe der bereits gesetzten Referenzpunkte

From: <https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link: [https://onyxwiki.net/doku.php?id=to\\_auxwdw](https://onyxwiki.net/doku.php?id=to_auxwdw)

Last update: 2021/09/30 12:37

