


# Optionen Durchzeichnung


Über Taste [Optionen] in Panel Durchzeichnung lassen sich auf einzelnen Reitern verschiedenste Einstellungen in Hinblick auf Grafik-Overlays über 2D- und 3D-Bildfenstern vornehmen.

## Reiter |Punkte|

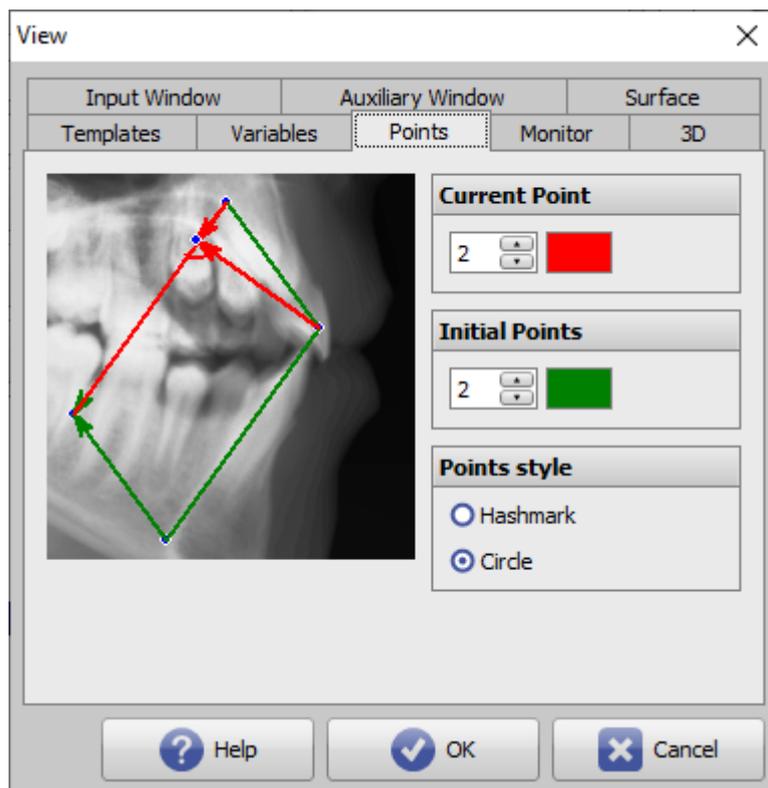

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Im Kontextmenü über einem berechneten Punkt in der Punkteliste in Modul Auswertung kann die zur Berechnung der Punktposition benutzte Definition grafisch veranschaulicht werden.

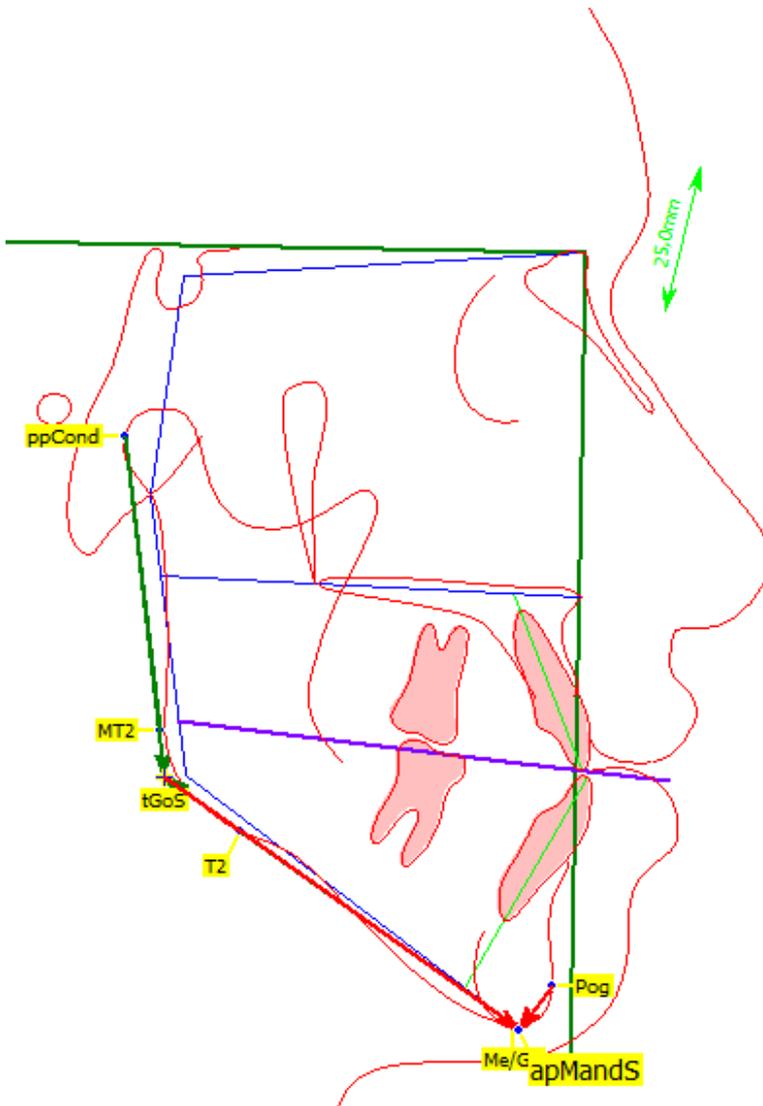

Landmarks	
Me/Gn Menton	
T2 Gonion Inferior	
Go Gonion	
tGo Intersection of Ramus Line and Mand. Plane	
Pog Pogonion	Help to tGo
Gn Gnathion	Calculation of tGo
apMandS Mand. Leng	noXRayCeph Import
D Center of Symphys	Align Images
m/RGn Mand. Symphy	
Id Infradentale	Delete All Landmarks
B Downs B-Point	Delete Display

Current Point	
2	

Initial Points	
2	

### Panel Aktueller Punkt


Die für die Darstellung der Berechnung des aktuellen Punktes verwendete Farbe und Linienstärke kann hier vorgegeben werden.

### Panel Ausgangspunkte

Die für die Darstellung der Berechnung der Ausgangspunkte verwendete Farbe und Linienstärke kann hier vorgegeben werden.

### Panel Stil Punkte

Hier kann der Stil der Referenzpunktmarker für die 2D-Durchzeichnung ausgewählt werden.

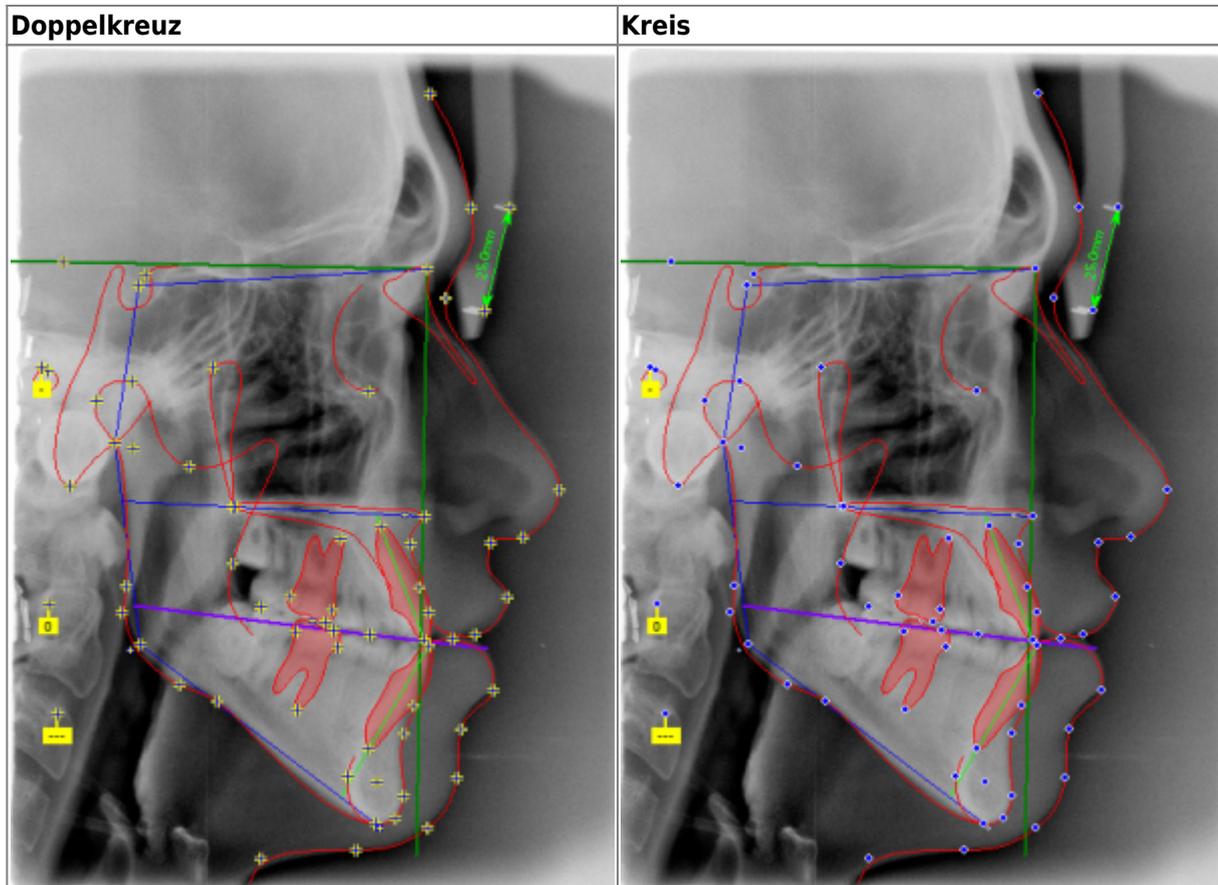

From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]  
Permanent link:  
[http://onyxwiki.net/doku.php?id=to\\_points](http://onyxwiki.net/doku.php?id=to_points)  
Last update: 2021/10/14 15:29

