


# Optionen Durchzeichnung

Über Taste [Optionen] in Panel Durchzeichnung lassen sich auf einzelnen Reitern verschiedenste Einstellungen in Hinblick auf Grafik-Overlays über 2D- und 3D-Bildfenstern vornehmen.

## Reiter |Konturen|

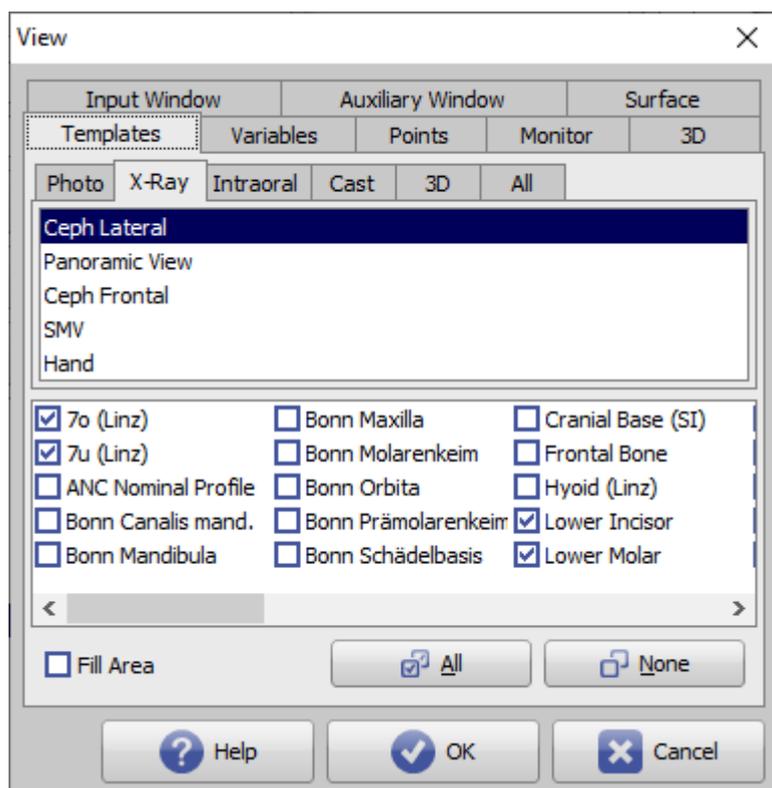

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Auf Reiter |Konturen| kann für jeden Durchzeichnungstyp separat festgelegt werden, welche Konturen zusätzlich zur Durchzeichnung angezeigt werden sollen. Die Konturen werden unabhängig von der Analysenauswahl gezeichnet und können bei Bedarf in ihrem Verlauf als Bezierkurve manuell angepasst werden. Wenn für das Zeichnen der Konturen zusätzlich zu den durch die aktuelle Analysenauswahl abgefragten Referenzpunkten weitere Punkte benötigt werden, dann werden die der Punkteliste automatisch hinzugefügt und in der in der für den Durchzeichnungstyp festgelegten Reihenfolge eingeordnet.

## Panel oben

Hier werden auf den Reitern

- Foto
- Röntgen
- Intraoral
- Modell
- 3D
- Alle

die für die jeweilige Bildart unterstützten Durchzeichnungstypen aufgelistet.


## Panel unten

Im Panel werden die für den darüber ausgewählten Durchzeichnungstyp installierten Standard- und Individualkonturen aufgeführt. Die Checkbox vor jedem Eintrag steuert die Sichtbarkeit der Kontur in der Durchzeichnung.

Mit der Checkbox

- Bereich füllen

kann bestimmt werden, dass die geschlossene Zahnkonturen ausgefüllt werden.

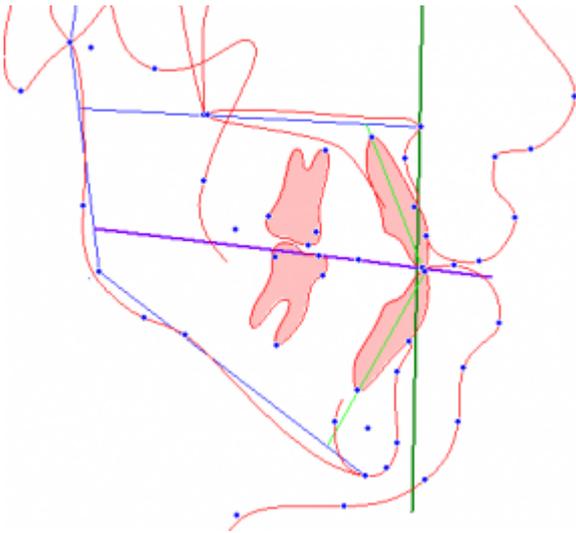

Die Einstellungen betreffen den lokalen Arbeitsplatz.

From:  
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=to\\_templates](https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=to_templates)

Last update: **2021/10/01 15:06**

